

# Askina® Barrier Film

## Schnelltrocknender, atmungsaktiver Hautschutz



### TIPP

- › Halten Sie die Sprühdüse 10 bis 15 cm von der Haut weg, drücken Sie die Sprühdüse und tragen Sie eine gleichmäßige Beschichtung des Films über die notwendige Fläche auf.
- › Lassen Sie den Film für 30 Sekunden trocken.

Askina® Barrier Film, der effektive Hautschutz für die Pflege in der Stoma-, Inkontinenz- sowie der Wundversorgung.

Der flüssige Schutzfilm von Askina® Barrier Film trocknet schnell ab und schützt die Haut zuverlässig vor aggressiven Körperausscheidungen, Klebstoffen und Reibungen - bis zu 72 Stunden.

- › Alkoholfrei und transparent
- › Sauerstoff- und feuchtigkeitst durchlässig
- › Trocknet in nur 30 Sekunden
- › Hilft vorzubeugen, zu schützen und zu erhalten
- › Effektiver Hautschutz

### Einsatzgebiete

- › Vorbeugung gegen Hautschädigungen durch Reibung oder Feuchtigkeit
- › Schutz der Haut vor Mazeration

### Einsatzgebiete



① Inkontinenz Patienten



② Inkontinenz Dermatitis mit Hautschäden



③ Wundrand



④ Kathetereintrittsstelle



⑤ Peristomiale Haut

Askina® Barrier Film	Abmessung	VE	PZN	REF
Pumpspray	28 ml	1 Stück	6905222	4002801
	28 ml	12 Stück	6905245	4002812
Applikator	1 ml	5 Stück	6905162	4000105
	1 ml	25 Stück	6905179	4000125

