

# DracoFoam

Infekt haft

## Polyhexanidhaltige Schaumstoffwundauflage mit Haftrand für infizierte Wunden

**DracoFoam Infekt haft** ist eine sterile hydrophile Polyurethanschaumstoffwundauflage, die der Abdeckung der Wunde und Absorption des Exsudats dient. Die überschüssige Flüssigkeit wird zur Polyurethan-Membran transportiert, so dass diese dort abdampfen kann. **DracoFoam Infekt haft** schafft ein idealefeuchtes Wundklima und ist somit für eine Vielzahl von chronischen und sekundär heilenden Wunden geeignet. Der Polyurethanschaum ist besonders flexibel, wölbt sich in der Anwendung dem Wundgrund entgegen und besitzt ein hohes Exsudataufnahmevermögen. Die Polyurethanfolie verhindert das Entweichen des Sekrets und stellt eine Barriere gegen Erreger von außen dar. **DracoFoam Infekt haft** enthält die antimikrobiell wirkende Substanz Polyhexanid, welche in der Wundauflage als antimikrobielle Barriere fungiert, die Mikroorganismen aus dem Wundexsudat aufnimmt und einer Kolonisierung bzw. Verbreitung von Bakterien innerhalb der Wundauflage entgegenwirkt. Dadurch können Wundinfektionen verhindert bzw. die Ausbreitung eingedämmt werden. Die transparente Polyurethan-Membran ist selbstklebend durch Verwendung eines hautfreundlichen und sicher haftenden Acrylatklebers.

### Anwendungsgebiete:

**DracoFoam Infekt haft** ist geeignet für akute sowie chronische, kritisch kolonisierte oder infizierte Wunden mit mäßig bis starkem Exsudataufkommen, z. B. oberflächliche Wunden wie Ulcus cruris (venös, arteriell), Dekubitus, diabetisches Fußulcus, Verbrennungen 2. Grades sowie Hautspenderareale.

### Anwendungshinweise:

Vor der Anwendung von **DracoFoam Infekt haft** die Wunde reinigen und die Wundumgebungshaut sorgfältig trocknen. **DracoFoam Infekt haft** aus der sterilen Einzelverpackung entnehmen, die Wundauflage mit der weißen Schaumstoffseite auf die Wunde legen. Die Schutzfolien vom Verband entfernen und die Wundauflage mit der weißen Schaumstoffseite auf die Wunde legen. Anschließend die Kleberänder sanft auf die Haut andrücken. Dabei ist zu beachten, dass die Schaumstoffwundauflage ausreichend über die Wundränder hinausgeht.

Acrylatkleber haftet nur einmal, eine Repositionierung des Verbandes ist somit nicht möglich. Aufgrund der selbsthaftenden Eigenschaft von **DracoFoam Infekt haft** wird keine weitere Fixierung benötigt.



Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann **DracoFoam Infekt haft** bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben.

**DracoFoam Infekt haft** darf nur einmal verwendet werden. **DracoFoam Infekt haft** ist steril, solange die Einzelverpackung ungeöffnet und unversehrt ist. **DracoFoam Infekt haft** nicht bei beschädigter Verpackung anwenden.

Eine Wunde steht immer im Zusammenhang mit dem Gesamtorganismus. Die Beseitigung aller Faktoren, die eine Wundheilung hemmen können, ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Wundbehandlung.

Enthält Polyhexanid und Dexpanthenol.

### Gegenanzeigen:

**DracoFoam Infekt haft** soll nicht verwendet werden bei:

- chirurgischen Implantaten
- Verbrennungen 3. Grades

**DracoFoam Infekt haft** nicht zusammen mit oxidierenden Lösungen wie z.B. Hypochlorit oder Wasserstoffperoxid anwenden.

Bei Schwangerschaft und Stillzeit bitte den Arzt konsultieren.

**DracoFoam Infekt haft** soll nicht bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber Polyurethan, Polyhexanid oder Acrylatkleber angewendet werden.

### Verfügbare Größen:

5 cm x 5 cm	PZN: 11300219
7,5 cm x 7,5 cm	PZN: 07730635
10 cm x 10 cm	PZN: 10084110
12,5 cm x 12,5 cm	PZN: 07730658

Produkte, die von Dr. Ausbüttel & Co. GmbH zum einmaligen Gebrauch bestimmt sind, dürfen nicht (wieder)aufbereitet werden. Eine (Wieder)aufbereitung zerstört die funktionale Integrität der Produkte.



Rev.: 181010RW-13926-GA