

# Askina® Derm

## Semipermeabler Transparent-Wundverband



### TIPP

Dekubitus-Prophylaxe im Sakralbereich:  
Zwei in der Größe passende Askina® Derm leicht überlappend auf beide Gesäßhälften legen. Der Rahmen des ersten Verbandes muss vor der Applikation des zweiten Verbandes entfernt werden.

Askina® Derm einfach entfernen:  
Einen Pflasterstreifen aufkleben und alles an diesem abziehen.

Der semipermeable Transparentverband Askina® Derm aus Polyurethan wird bevorzugt in den Bereichen Kanülen- und Katheterfixation und zur Wundversorgung eingesetzt.

- › Sicherer Schutz vor Feuchtigkeit und Mikroorganismen
- › Ständige Beobachtung der Punktionsstelle oder der Wunde ohne Verbandwechsel
- › Reduziert die Scherkräfte z. B. im Sakralbereich
- › Verbesserte Wasserdampfdurchlässigkeitsrate (MVTR)

### Das neue innovative Anwendungssystem von Askina® Derm



- ① Entfernen des bedruckten Schutzpapiers von der klebenden Seite des Verbands.
- ② Positionieren des Verbands mit der klebenden Seite nach unten über der Wunde. Sanft andrücken.
- ③ Seitliche Schutzfolien langsam mit beiden Händen entfernen. Verband mit abrollenden Bewegungen auf der gesunden Haut festdrücken.
- ④ Nach Befestigung des Verbands Trägerfolie mit den grünen Pfeilen in Pfeilrichtung abziehen.

Askina® Derm	Abmessung	VE	PZN	REF
Kleinpackungen	4,4 cm x 4,4 cm	5 Stück	0156222	F72028
	6 cm x 7 cm	5 Stück	0156239	F72031
	10 cm x 12 cm	5 Stück	0156245	F72034
Großpackungen	4,4 cm x 4,4 cm	100 Stück	7430086	F72030
	6 cm x 7 cm	100 Stück	7430092	F72033
	10 cm x 12 cm	50 Stück	7430100	F72036
	15 cm x 20 cm	10 Stück	7430123	F72038

### Einsatzgebiete

#### Fixierung

- › Ideal zur Fixierung von intravenösen Kathetern

#### Wundversorgung

- › Dekubitusprophylaxe und -therapie
- › Hautabschürfungen
- › Hautspendeareale
- › Oberflächliche Verbrennungen
- › Als Sekundärverband beim Einsatz von Askina® Gel, Prontosan® Wound Gel oder Salben

