

# Neoflex Femuvit 380



Artikel-Nr.: 520-607

## Produktbeschreibung

Die anatomisch geschnittene Oberschenkelbandage **Neoflex Femuvit 380** aus Neoflex bietet sicheren Halt und wärmt die Muskulatur. Das perforierte Neoflex hält die Körperwärme, ist wasserabweisend und atmungsaktiv. Sie ist besonders hautfreundlich und hat einen angenehmen Tragekomfort.

## Indikation

- Muskelrelaxation (Muskelerschlafung)
- Myalgie (Muskelschmerzen)
- Kontusion und Muskelfaserrisse im Oberschenkelbereich
- Entesopathie
- zur Prophylaxe bei sportlichen Aktivitäten

## Gebrauchsanweisung

Die Bandage wird mit der verstärkten Naht nach hinten über den Oberschenkel gezogen. *Das Produkt ist den Angaben und dem Zweck entsprechend anzuwenden.*

## Hinweis

Bei schweren Verletzungen, offenen Wunden, Schwellungen, Allergien und anderen Erkrankungen bzw. Komplikationen ist unbedingt der Arzt oder Apotheker zu konsultieren. Um den korrekten Sitz der Neoflex Femuvit 380 zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen und Einstellen durch den Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker erfolgen. Sollte im Bein ein Kälte- bzw. Taubheitsgefühl entstehen, ist die Bandage sofort zu lockern oder abzulegen und Sitz und Größe durch Arzt oder Fachgeschäft zu überprüfen. Anwendung während des Schlafens nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker.

## Pflegeanleitung

Die Bandage vorsichtig mit der Hand bei 30° C in milder Seifenlauge reinigen. Erhitzen durch direkte Sonnenstrahlen, Heizkörper, Bügeleisen, o. ä. unbedingt vermeiden. Nicht bleichen, nicht chemisch reinigen.

## Farbe

schwarz

| Messpunkt                 | Größe | OS-Umfang     |
|---------------------------|-------|---------------|
| <p>Oberschenkelumfang</p> | XS    | 33 cm - 39 cm |
|                           | S     | 38 cm - 44 cm |
|                           | M     | 42 cm - 49 cm |
|                           | L     | 46 cm - 52 cm |
|                           | XL    | 50 cm - 56 cm |

## Allgemeiner Hinweis zu Neoflexprodukten

Der Neoflexschaum wirkt isolierend und besitzt vielgestaltige elastische Eigenschaften. Dadurch hält er die Körperwärme, schützt die Muskulatur und sorgt für eine gute Durchblutung, sowie für genügend Druck und Unterstützung während der Behandlung. Das Risiko von Verletzungen nach sportlicher Betätigung z.B. Verstauchungen, Verrenkungen und Muskelrissen durch zu schnelle Abkühlung wird reduziert. Der Heilungsprozess wird beschleunigt.

## Für eine gesunde Generation die günstige Alternative

**Orpedo**<sup>®</sup>  
ORTHOPEDICS COMPANY

Orpedo  
Orthopedics Company KG

Knesebeckstraße 54  
D-10719 Berlin

Postfach 15 05 44  
D-10667 Berlin

Tel +49-30-88 00 77 10  
Fax +49-30-88 00 77 14

Web [www.orpedo.com](http://www.orpedo.com)  
Mail [info@orpedo.com](mailto:info@orpedo.com)