



- ✓ phosphatfrei
- ✓ ohne tierische Inhaltsstoffe
- ✓ ohne Konservierungsstoffe

Augen-Tropfen

Hyaluron 0,4%

EXTRA

Doppelherz Augen-Tropfen Hyaluron 0,4 % EXTRA ist eine sterile Lösung zur Anwendung am Auge mit einem physiologischen pH-Wert, die auf Basis einer patentierten Technologie quervernetzter Hyaluronsäure mit Urea die spezifischen mechanischen Eigenschaften der ursprünglichen Hyaluronsäure verstärkt und verbessert, dem Abbau durch Hyaluronidase viel länger widersteht als die ursprüngliche Hyaluronsäure und somit eine stärkere und längere die Gleitfähigkeit erhöhende und feuchtigkeitsspendende Wirkung als die ursprüngliche Hyaluronsäure erzielt.

Die feuchtigkeitsspendende Netzstruktur der quervernetzten Hyaluronsäure kann Wasser über einen längeren Zeitraum abgeben, wodurch die Gleiteigenschaften der ursprünglichen Hyaluronsäure verbessert werden und gleichzeitig ihre feuchtigkeitsspendende Wirkung verstärkt wird, weshalb sie beim Trockenen-Augen-Syndrom, als Hilfsmittel angezeigt ist.

Die quervernetzte Hyaluronsäure verleiht dem Produkt gleitfähigkeitserhöhende, feuchtigkeitsspendende und reparierende Eigenschaften, die in der Lage sind, trockene Augen aufgrund des Trockenen-Augen-Syndroms sowie gereizter oder müder Augen bei Entzündungen oder durch Umweltfaktoren zu lindern.

Die Formel wurde entwickelt, um bereits unmittelbar nach der Anwendung maximalen Komfort zu gewährleisten. Sie ist für den täglichen Gebrauch sowohl tagsüber als auch nachts geeignet.

Sie enthält keine Konservierungsstoffe und/oder Moleküle mit antientzündlichen und gefäßverengenden Wirkungen. Doppelherz Augen-Tropfen Hyaluron 0,4 % EXTRA sind für Kontaktlinsenträger geeignet.

VERWENDUNGSZWECK


Doppelherz Augen-Tropfen Hyaluron 0,4 % EXTRA sind angezeigt:

- zur Wiederherstellung und Verbesserung der Tränenfilmstabilität beim Trockenen-Augen-Syndrom;
- nach refraktiver Chirurgie;
- zur Linderung der Augen bei Rötung, Ermüdung und Beschwerden am Auge oder an der Augenschleimhaut als Folge von:
 - Umwelteinflüssen (Klimaanlagen, übermäßige Sonneneinstrahlung, Wind, Rauch, Umweltverschmutzung, Meer- oder Schwimmbadwasser und getrocknetes Salz);
 - bei trockenen Augen aufgrund übermäßiger Ermüdung durch langes Arbeiten am Computer oder Lesen;
 - bei Abweichungen der Tränenproduktion infolge von Entzündungen, chronischer Lidrandentzündung;
 - bei Abweichungen der Tränenproduktion als Folge von Augenoperationen verschiedener Art oder ästhetischen Eingriffen an den Augenlidern;
 - beim Tragen von weichen oder halbstarren Kontaktlinsen.

Zusammensetzung:

Wässrige Natriumhyaluronat-Crosspolymerlösung (davon Natriumhyaluronat-Crosspolymer 0,4 %), Trometamol, Salzsäure (2N), Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke. Frei von Konservierungsstoffen.

Anwendungshinweise:

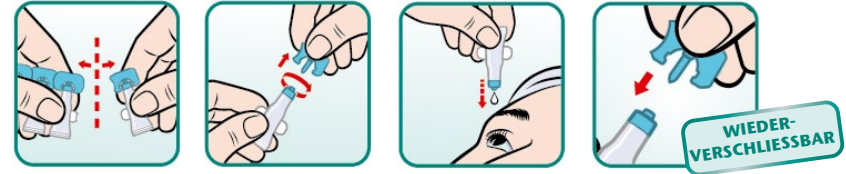

- Waschen und trocknen Sie vor der Anwendung gründlich Ihre Hände;
- Trennen Sie ein Einzeldosisbehältnis vom Streifen ab;
- Drehen und entfernen Sie die Kappe, um die Versiegelung zu öffnen;
- Legen Sie die Kappe behutsam auf eine saubere Unterlage;
- Geben Sie durch leichtes Zusammendrücken des Einzeldosisbehältnisses 2 Tropfen in jedes Auge, sofern nicht anders verordnet;
- Verschließen Sie das Einzeldosisbehältnis sofort nach Gebrauch: Der Inhalt muss nach dem ersten Anbruch innerhalb von 12 Stunden verwendet werden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

- Das Produkt ist nur zur Anwendung bei einem einzigen Patienten bestimmt.
- Das Produkt ist nur zur äußeren Anwendung am Auge.
- Wenden Sie das Produkt nicht an, wenn das Einzeldosisbehältnis beim Kauf beschädigt oder unverschlossen ist;
- Nicht anwenden, wenn Partikel und/oder Farbveränderungen der Lösung sichtbar sind.
- Berühren Sie während der Anwendung nicht Ihre Augen oder eine andere Oberfläche mit der Tropferspitze des Behältnisses.
- Wenden Sie das Produkt nicht nach dem auf dem Umkarton und dem Einzeldosisbehältnis angegebenen Verfalldatum an.
- Bei auftretenden Nebenwirkungen brechen Sie die Behandlung ab und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Nicht bei bekannter Unverträglichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe der Lösung anwenden.
- Über Wechselwirkungen mit Arzneimitteln oder anderen Augentropfen wurde nicht berichtet; allerdings sollte bis zur Verabreichung anderer Augentropfen ein Abstand von mindestens 15 Minuten eingehalten werden.
- Entsorgen Sie das Produkt gemäß Ihren örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Bewahren Sie das Produkt für Kinder unzugänglich auf.
- Wenn Sie schwanger sind oder stillen, fragen Sie vor der Anwendung dieses Produkts Ihren Arzt um Rat.
- Zur äußerlichen Anwendung, nicht schlucken.
- Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem Sie wohnen, gemeldet werden.

Nebenwirkungen:

Unmittelbar nach der Anwendung kann das Produkt aufgrund der Viskosität der Lösung vorübergehend ein leichtes verschwommenes Sehen verursachen. Es ist daher ratsam, vor der Ausübung einer Tätigkeit, die eine klare Sicht erfordert, einige Sekunden zu warten.

Aufbewahrung:

Das Produkt bei einer Temperatur zwischen 2 °C und 30 °C an einem trockenen Ort lagern, fern von Wärme und direkter Sonneneinstrahlung. Der Inhalt muss innerhalb von 12 Stunden nach dem ersten Anbruch verwendet werden.

Packung:

10x 0,5 ml wiederverschließbare Einzeldosierungen.

Validität:

Bei ungeöffneter Packung darf das auf dem Umkarton und dem Einzeldosisbehältnis angegebene Verfalldatum nicht überschritten werden.

Mat.-Nr.: 90587300

COC Farmaceutici S.r.l.
Via Modena, 15
40019 - Sant'Agata Bolognese (Bo)
Italien

Vertrieb und Information:
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
Deutschland

CE 0051
MEDIZINPRODUKT

MD

STERILE A

#

DT/01/DT/010

Diese Gebrauchsanweisung wurde zuletzt überarbeitet 02.01 von 10/2022



Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
DEUTSCHLAND
www.doppelherz.de