

Naclens

PZN 2249152

360 ml

Kochsalzlösung

Für Kontaktlinsen aller Art

Naclens Kochsalzlösung ist eine Lösung zum Abspülen und Aufbewahren aller Arten von Kontaktlinsen. Es wird empfohlen, sie insbesondere zum Spülen der Linsen nach Benutzung des täglichen Reinigers und bei der Anwendung von Enzymtabletten einzusetzen.

GEBRAUCHSANLEITUNG:

Spülen

1. Waschen Sie sich gründlich die Hände.

1. Spülen Sie die Linse nach der Reinigung auf beiden Seiten mit reichlich Naclens Kochsalzlösung ab.

Thermische Desinfektion

Sollte eine thermische Desinfektion notwendig sein, ist folgendermaßen vorzugehen:

1. Füllen Sie den Behälter mit Naclens Kochsalzlösung.

2. Legen Sie den Behälter in das Desinfektionsgerät und beachten Sie die Gebrauchsanweisung für das Gerät zur thermischen Desinfektion.

VORSICHTSMAßNAHMEN:

- Vermeiden Sie den Kontakt der Pipette mit anderen Gegenständen.
- Die Flasche stets gut verschließen.
- Nach erstmaligem Öffnen ist das Produkt innerhalb von 60 Tagen zu verbrauchen.
- Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.

ZUSAMMENSETZUNG:

Isotonische und gepufferte Kochsalzlösung mit 0,05 % Dinatriumedetat und 0,0002 % Polyhexamethylen biguanidin.

Antiseptisch abgefüllt.

Vertrieb in Deutschland

Osmed UG

Frankfurter Str. 51

58095 Hagen

Tel: 02331/ 788290

Fax: 02331/ 7882929

e-Mail: info@osmed.de

web: www.Osmed.de