

**Handhabung:** wie bei der Pinzette mit Greifklauen direkt auf der Haut zusammendrücken bis rastet => Zeckenkopf wird gequetscht und festgehalten, dann leicht drehen und herausziehen fertig => mit Schieber entrasten => Zecke fällt heraus danach zurück in Hülle ( Hard-Box ) stecken

PZN  
4155550

**Vorteile:** => Zeckenkopf wird gequetscht  
=> kein weiterer Speichelfluß der Zecke  
=> dauerhaftes Halten nach dem rasten  
=> Kontaktbereich der Zeckenzange mit der Zecke  
ist danach in der Hülle => keine Berührung  
=> sichere Funktion mit schönem Design