

Calcavit 740 Längenausgleich



Artikel-Nr.: 608-740

Produktbeschreibung

Calcavit 740 ist ein Fersenkissen aus Silikon, welches dank seiner speziellen Viscoelastik (Zusammensetzung des Silikons) in seiner Schlagabsorbierung einmalig ist. Daher werden durch das Gehen/Laufen bedingte Stöße auf Sprunggelenk, Knie, Hüfte und Wirbelsäule auf ein Minimum reduziert. Daraus resultieren erhebliche Entlastungen der Ferse, der Gelenke, Bänder, Muskeln und Sehnen. Calcavit Fersenkissen sind rutschfest und können in Straßen-, Sport- und Arbeitsschuhen getragen werden.

Indikation

- zum Ausgleich von Beinlängendifferenzen, Beckenschiefstand, Skoliose der Wirbelsäule
- bei künstlichen Gelenken (Endoprothesen) zur Entlastung
- zur Vermeidung von Druckspitzen bei Fersensporn
- Verschleiß (Arthrose): der Sprung-, Knie-, Hüft-, Ileosakral- und Zwischenwirbelgelenksarthrose
- Schleimbeutelentzündung
- Achillessehnenbeschwerden (Achillodynie)
- nach Fersenbeinbruch
- rutsch- und druckfest, angenehmer Tragekomfort

Kontraindikation

- Das Tragen des Fersenkissens ist bei nachfolgenden Krankheitsbildern nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt durchzuführen.
- Hauterkrankungen/Verletzungen im versorgten Körperabschnitt, insbesondere bei entzündlichen Erscheinungen.
 - aufgeworfene Narben
 - Schwellungen und Rötungen
 - Überwärmungen

Größe	Schuhgröße	Höhe
S	35 - 37	5 mm
M	38 - 40	8 mm
L	41 - 43	10 mm
XL	44 - 46	

Gebrauchsanweisung

Legen Sie das Calcavit Fersenkissen so in den Schuh ein, dass es formschlüssig mit dem Fersenbereich des Schuhs abschließt. Achten Sie darauf, dass die Fersenkappe des verwendeten Schuhs hoch genug ist, da es sonst zu Schlapp-effekten kommen kann. Bitte Baumwollstrümpfe tragen.

Pflegeanleitung

Mit warmem Seifenwasser 30° C reinigen, einem Handtuch trocknen und anschließend mit etwas Talkum oder Baby-puder pudern. Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden. Nicht wringen! Wärmequellen, scharfe Gegenstände und Sonstiges vermeiden. Desinfektion ist durch kochendes Wasser möglich

Für eine gesunde Generation die günstige Alternative

Orpedo[®]
ORTHOPEDICS COMPANY

Orpedo
Orthopedics Company KG

Knesebeckstraße 54
D-10719 Berlin

Postfach 15 05 44
D-10667 Berlin

Tel +49-30-88 00 77 10
Fax +49-30-88 00 77 14

Web www.orpedo.com
Mail info@orpedo.com