



# Mesalt®



USA 1-800-882-4582

Canada 1-800-494-5134



MÖLNLYCKE  
HEALTH CARE






Mölnlycke Health Care AB (Publ), Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden

[www.molnlycke.com](http://www.molnlycke.com)




zur Verfügung gestellt von [Gebrauchs.info](http://Gebrauchs.info)

## Mesalt

5 x 5 cm • 7.5 x 7.5 cm • 10 x 10 cm

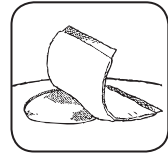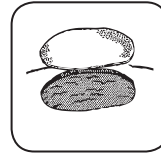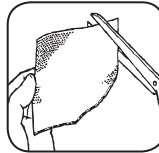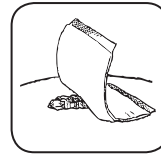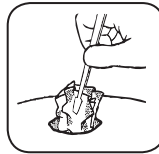

2 x 100 cm

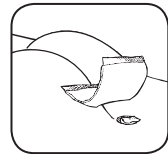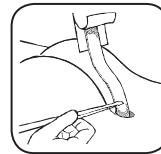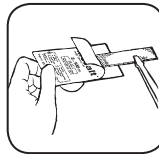

**Produktbeschreibung:**

Mesalt besteht aus einem weichen Vliesstoff (Viskose/Polyester), welcher mit Kochsalz imprägniert ist. Mesalt unterstützt die Wundreinigung bei sezernierenden, belegten oder infizierten Wunden.

**Anwendungsgebiete**

Mesalt ist indiziert als Primärverband für mittel bis stark sezernierende, infizierte Wunden, wie beispielsweise Ulcus cruris, Dekubitus, etc.

**Bitte beachten**

Mesalt sollte nicht bei vorbelasteten Patienten mit allergischen Reaktionen auf die o.g. Inhaltsstoffe angewendet werden. Mesalt sollte nicht bei trockenen oder wenig sezernierenden Wunden eingesetzt werden. Mesalt sollte auch nicht in direkten Kontakt mit Knochen und Sehnen gelangen. Infizierte Wunden sollten vorher begutachtet und in geeigneter Form behandelt werden.

**Applikation:**

1. Falls erforderlich, reinigen Sie die Wunde und entfernen Sie übermäßiges nekrotisches Gewebe.
2. Trocknen Sie die wundumgebende Haut, jedoch nicht die Wunde.
3. Sofern medizinisch indiziert, schützen Sie die wundumgebende Haut mit einer geeigneten, wasserabweisenden Creme oder Salbe.
4. Wählen Sie eine geeignete Verbandgröße aus, welche- die Wunde komplett abdeckt- tiefe Wunden komplett ausfüllt.
5. Vermeiden Sie, dass Mesalt die wundumgebende Haut bedeckt.
6. Abhängig von der Exsudation sollte ein geeigneter, saugfähiger Sekundärverband verwendet werden.
7. Sofern medizinisch indiziert, kann Mesalt während einer Kompressions-therapie angewendet werden.

**Verbandwechsel**

Mesalt sollte abhängig vom Wundzustand oder nach Erreichen seiner Aufnahmekapazität gewechselt werden (bei stark exsudierenden Wunden ca. 1 mal täglich) oder der erforderlichen medizinischen Versorgung. Sollte eine Verschlechterung der Wundsituation oder sonstige Reaktionen eintreten, so ist Mesalt nicht mehr anzuwenden und medizinisches Fachpersonal zu befragen.

Sterilität wird garantiert, sofern die Sterilverpackung nicht beschädigt ist bzw. geöffnet wurde.

Nicht resterilisieren.

**zur Verfügung gestellt von [Gebrauchs.info](http://Gebrauchs.info)**

Revised 2009-04  
40300-04

**Aktualisierungsstand [Gebrauchs.info](http://Gebrauchs.info) November 2011**