



COMPRESSANA MICROCOTTON


ca. 14 mmHg

Stützklasse II

medium

Kniestrümpfe, Halterlose Strümpfe mit Dekor-Haftband und Strumpfhosen mit etwa hohem Baumwollanteil für höchste Ansprüche zum Wohlfühlen. Für Kunden, die natürliche Baumwolle auf der Haut schätzen. Für Damen, die synthetische Fein(Stütz)strümpfe nicht mögen oder denen sie zu dünn bzw. transparent sind.

- **blickdichte, feinmaschige und attraktive Optik**
- **kuschelweich, anschmiegsam und atmungsaktiv**
- **mit natürlicher und hautsympathischer Baumwolle**
- **perfekter Tragekomfort und Passform**
- **Außenseite Mikrofaser, Innenseite natürliche Baumwolle plus hochelastisches Lycra.**

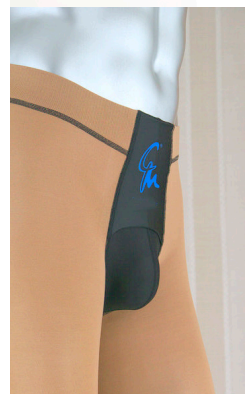

Produkt	Größe	Farbe
Microcotton Strumpfhose	II-V S-XL	
Microcotton „Stay-up“ Schenkelstrümpfe mit Dekorhaftband	II-V S-XL	
Microcotton Kniestrümpfe All Seasons – für ein angenehmes Fußklima	II-V S-XL	

Anzieh- und Pflegehinweise

Diese Strümpfe und Strumpfhosen sollten nicht angezogen, sondern möglichst ohne Zug mit der flachen Hand nach oben gestreift werden. Verteilen Sie das Gestrick gleichmäßig am Bein. Korrigieren Sie ggf. nach dem Anlegen den Sitz mit COMPRESSANA GRIP Spezialhandschuhen.

Auch nach vielen Wäschen behalten **COMPRESSANA Microcotton** ihr gutes Aussehen und ihre Wirkungskraft:

- **Handwäsche** mit COMPRESSANA CLEAN Feinwaschmittel in handwarmen Wasser. Gut ausspülen, nicht wringen!
- **Maschinenwäsche** mit Feinwaschmittel im Schonwaschgang bis 40°C. Wir empfehlen die Verwendung des COMPRESSANA Wäschenetzes.
- **Trocknen:** im Handtuch rollen oder auf eine Leine hängen. Nicht auf der Heizung oder in der prallen Sonne trocknen! Nicht in den Trockner!

Vor dem Tragen waschen • auf links waschen
• keine Weichspüler verwenden

Größenübersicht MICROCOTTON

Gr.	Konfektion	Größe/cm	Gewicht/kg	Figurtyp	Schuhgröße
II	S	ca. 150-165	ca. 50-60	schmal – klein	35-38 3 – 5
III	M	ca. 160-175	ca. 58-70	normal	37-40 4½ – 6½
IV	L	ca. 165-180	ca. 68-80	normal – groß	39-42 6 – 8
V	XL	ca. 165-180	> 80	kräftig – normal	42-45 8 – 10½

Für Männer: Beachten Sie die Verschiebung der Konfektionsgrößen.
Es gilt: III=S, IV=M, V=L-XL.

