

# Sicher Spülen mit dem B. Braun-System

Einfach, schnell, wirtschaftlich



Das Spüllösungsprogramm in  
Ecobag® click, Ecolav® und Ecotainer®

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

# Ecobag® click

Immer die beste Verbindung ... passt sich jeder Bewegung an

**Spüllösungsbeutel mit innovativem Verschlussystem: leichtes Konnektieren und 360° Beweglichkeit**

Nur ein kurzes Klicken und der Ecobag® click ist angeschlossen. Fest und kontaminationssicher. Der flexible, drehbare Kopf der Ecoclick®-Überleitgeräte passt sich jeder Bewegung an und erleichtert so die Handhabung. Ein Verhaken oder Verklemmen des Schlauches wird vermieden. Und mit einem leichten Druck auf die Seitenflügel wird der Verschluss wieder gelöst. Der Port verschließt sich sofort vollständig.



Portsystem durch Abdrehen der Verschlusskappe öffnen.



Ecoclick®-Konnektor bis zur Rastung in den Port drücken.



Zum Dekonnektieren Seitenflügel drücken und Ecoclick® herausziehen.

- Komfortables Handling durch 360° flexiblen Drehkopf
- Leichte und sichere Arretierung des Überleitgerätes im Portsystem
- Wiederabdichtende Ports



# Ecolav®

Mit sanftem Druck präzise spülen ... und dabei Zeit und Kosten sparen

## Flexibler Spülbehälter für punktgenaue, effiziente Anwendungen

Das weiche Material des Ecolav®-Behälters (Polyethylen) und die Sprühdüse ermöglichen eine punktgenaue Spülung durch sanften Druck der Flasche. Aufgrund der verschiedenen Behältergrößen kann Ecolav® an jede Indikation angepasst werden. Durch die abdrehbare Verschlusskappe wird sofort mit der Anwendung begonnen – ohne Spritze, ohne Nierenschale.



### Druckanwendung

Ein geringer Druck auf die weiche Flasche bewirkt einen feinen, präzisen Strahl der Spüllösung.



### Punktförmige Anwendung

Der 30-ml-Minidosis-Behälter erlaubt eine auf den Punkt genaue Anwendung der Spüllösung.



### Ecolav® Estericlean®

Speziell für die Chirurgie: Ecolav® Estericlean® (500 ml) mit steriler Umverpackung.



- **Zeitersparnis**  
Reduzierter Vorbereitungsaufwand, Verschluss abdrehen, sofort benutzen
- **Kostensparnis**  
Ohne zusätzlichen Materialeinsatz (z.B. Nierenschale, Spritze) anzuwenden



# Ecotainer®

## Alles im Griff ... mit Sicherheit

### Ecotainer® für großvolumige Spüllösungen: sichere Handhabung, kein Verschütten beim Ausgießen

Der Ecotainer® besteht aus unzerbrechlichem, umweltfreundlichem Polypropylen. Er wurde so konzipiert, dass ein Verschütten des Inhalts unabhängig vom Ausgusswinkel nicht möglich ist. So können auch großvolumige Spüllösungen exakt dosiert werden.

Durch die Griff-Taille liegt der Behälter immer fest in der Hand. Besondere Sicherheit bietet der Ecotainer® aufgrund der verschieden farbigen Verschlusskappen, die eine schnelle und sichere Zuordnung der unterschiedlichen Spüllösungen ermöglichen:

- Ringer
- NaCl 0,9%
- Aqua



Die farbcodierten Verschlusskappen sind leicht zu öffnen. Und der weiße Versiegelungsring ist eine sichtbare Garantie für die Originalität der Spüllösung.



Die spezielle Konstruktion des Ecotainers hilft, dass beim Ausgießen der Spüllösung kein Tropfen daneben geht – auch bei voll gefülltem Behälter und steilem Ausgusswinkel. Zusätzlich sorgt die Messskala für eine exakte Dosierung je nach Indikation.




- Kein Verschütten – auch bei steilem Ausgusswinkel
- Komfortable Griff-Taille
- Farbige Verschlusskappen
- Transparent und unzerbrechlich



## Überleitsysteme für Spüllösungen (Ecobag® und marktübliche Beutelsysteme)

<b>Länge 210 cm</b>	<b>patientenseitiger Konusansatz mit 15 cm Silikonschlauch</b>
mit Click Konnektor	Ecoclick® Nr. 1 einläufig
	Ecoclick® Nr. 2 zweiläufig, mit Rasterklemmen
	Ecoclick® Nr. 4 einläufig, mit Rücklaufsperr
mit Spike Konnektor	Ecospike® Nr. 1 einläufig
	Ecospike® Nr. 2 zweiläufig, mit Rasterklemmen
	Ecospike® Nr. 4 einläufig, mit Rücklaufsperr
<b>Länge 330 cm (Arthros)</b>	<b>patientenseitiger Konusansatz mit 15 cm Silikonschlauch</b>
mit Click Konnektor	Ecoclick®-Arthros Nr. 1
mit Spike Konnektor	Ecospike®-Arthros Nr. 1
	<b>patientenseitiger Luer-Lock-Anschluss</b>
mit Click Konnektor	Ecoclick®-Arthros Nr. 2
mit Spike Konnektor	Ecospike®-Arthros Nr. 2

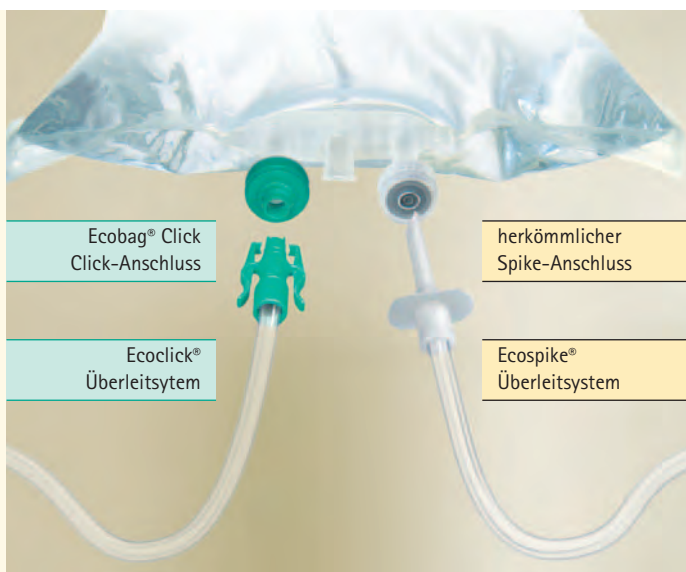

### ■ Ecobag® Click ist universell einsetzbar

Ein Beutel, zwei Alternativen – durch das Doppelportsystem ist Ecobag® Click auch mit allen herkömmlichen Dornanschlüssen und Überleitsystemen kompatibel



# Sicher Spülen mit dem B. Braun-System

Das Spüllösungsprogramm in  
Ecobag® click, Ecolav® und Ecotainer®

Ecolav®		NaCl 0,9%		Ringer-Lactat		Aqua	
Größe		REF	PZN	REF	PZN	REF	PZN
100 x	30 ml	404784	0201537	444994	3419047		
20 x	100 ml	387865	0201632	444995	3419053	387872	0202608
20 x	250 ml	387867	0201810			387873	0202614
10 x	500 ml	387868	0201833	387870	0202643	387874	0202620
10 x	1.000 ml	387869	0202212			387875	0202637
Estericlean® 10 x 500 ml		387866	0202554				

Ecotainer®		NaCl 0,9%		Ringer		Aqua	
Größe		REF	PZN	REF	PZN	REF	PZN
10 x	500 ml	81645E	0088779	82490E	0089046	82423E	0088986
6 x	1.000 ml	82489E	0089017	82491E	0089052	82479E	0088992

Ecobag® Click		NaCl 0,9%		Ringer		Glycine 1,5%	
Größe		REF	PZN	REF	PZN	REF	PZN
4 x	3.000 ml	FR99930	0498224	FR99944	0498543	FR99934	0498336
2 x	5.000 ml	FR99970	0498230	FR99984	0498566	FR99974	0498342
Größe						Sorbitol/Mannitol 3%	
4 x	3.000 ml					FR99938	0498419
2 x	5.000 ml					FR99978	0498425

Ecobag® Click			Überleitsysteme mit Click Anschluss			Überleitsysteme mit Spike Anschluss		
Typ (je 25 Stück)	REF	PZN	Typ (je 25 Stück)	REF	PZN	Typ (je 25 Stück)	REF	PZN
Ecoclick® Nr. 1	2112269	0498632	Ecospike® Nr. 1	2112268	0498603			
Ecoclick® Nr. 2	2112271	0498649	Ecospike® Nr. 2	2112270	0498626			
Ecoclick® Nr. 4	2112272	1795734	Ecospike® Nr. 4	3806073	0949974			
Ecoclick® Arthros Nr. 1	2112277	0498572	Ecospike® Arthros Nr. 1	3804003	7479661			
Ecoclick® Arthros Nr. 2	2112279	0498589	Ecospike® Arthros Nr. 2	2112278	0498595			

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

**B. Braun Melsungen AG**  
OPM

Carl-Braun-Str. 1  
D-34212 Melsungen  
Tel (0 56 61) 71-33 99  
Fax (0 56 61) 71-35 50

[www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)