

500 ml

Isogutt[®] akut MP

Isotonische
Natriumchloridlösung



**Notfall-
Augen-
spüllösung**



Optima Pharmazeutische GmbH

Ludwigstraße 49
D-85399 Hallbergmoos

1000 ml Lösung enthalten Natriumchlorid 9 g.
Weiterer Bestandteil: Wasser für Injektionszwecke.

Erste Hilfe durch sofortige Augenspülung am Unfallort, z. B. nach Verätzungen durch Chemikalien wie Säuren oder Laugen bei Fremdkörpern wie Splitter oder Staubpartikel.

Grundsätzlich gilt: Suchen Sie so schnell wie möglich einen Arzt auf.

Anwendungshinweise:

1. Flasche durch Drehen der farbigen Kappe öffnen + entfernen
2. Auge vorsichtig mit der Hand öffnen
3. Auge vorsichtig spülen
4. Spülvorgang solange fortführen, bis alle schädlichen Stoffe ausgespült sind
5. Bei Bedarf weitere Flaschen verwenden



- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Gebrauchsanweisung beachten
- Nicht verwenden, wenn der Originalitätsverschluss oder die Flasche beschädigt ist
- Kontaktlinsen vor der Anwendung entfernen
- Nicht anwenden bei perforierenden (offenen) Augenverletzungen
- Nur zum einmaligen Gebrauch. Bei Wiederverwendung von angebrochenen Flaschen besteht ein Infektionsrisiko
- Flasche zum Schutz vor Schädigung im Umkarton aufbewahren

00990489

Sterile isotonische
Augenspüllösung



CE 0482



STERILE A

LOT



005-00720/V03