

Ecosym Prothesenreiniger Weekly

PZN 09508817 | Art. 2261

Ecosym Prothesenreiniger Weekly bietet eine intensive wöchentliche Reinigung für Zahn-, Total- und Teilprothesen. Ideal für die Verwendung in Kombination mit einer Gebissbox und besonders einfach anzuwenden.



Der Ecosym Prothesenreiniger Weekly bietet eine zuverlässige Lösung für die wöchentliche Reinigung von Zahnprothesen. Seine hochwirksame Formel entfernt selbst hartnäckige Flecken, ohne dabei die Prothesen anzugreifen. Dieses Reinigungskonzentrat wurde speziell entwickelt, um eine intensive Reinigung zu gewährleisten und dabei gleichzeitig die Prothesenmaterialien zu schonen.

Anwendung:

Ecosym Forte in die Prothesenbox geben, bis der Boden des Siebs bedeckt ist. Die Zahnprothese wird dann in die Gebissbox gelegt und mit lauwarmem Wasser aufgefüllt, bis sie vollständig bedeckt ist. Nach einer Einwirkzeit von 8 Stunden wird die Prothese zusammen mit dem Sieb aus der Box genommen und gründlich mit lauwarmem Wasser abgespült.

Das Produkt zeichnet sich durch seine fortschrittliche biologische Reinigungsmethode aus, die auf natürlichen Inhaltsstoffen wie Zitronensäure, Eukalyptusöl und Meersalz basiert. Diese sorgen für eine gründliche Reinigung, ohne das Prothesenmaterial zu beeinträchtigen. Ecosym enthält keine Salzsäure und ist daher besonders schonend zur Prothese.

Der Lieferumfang umfasst eine 100 ml Flasche Ecosym Week Forte Prothesenreiniger, ausreichend für zahlreiche Reinigungsdurchgänge. Bitte beachten Sie, dass das Produkt ausschließlich zur äußerlichen Anwendung bestimmt ist.

Merkmale, Marke, Eigenschaften und Inhaltsstoffe

Ecosym, Aqua, Citric Acid, Limonene, Sodium Laureth Sulfate, Eucalyptol, Benzyl Alcohol, 2-Bromo-2-Nitropropane-1, 3-Diol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Produktinformationen

Abmessungen: 4,20 x 4,20 x 11,90 cm
Artikelgewicht: 0,120 kg
Gewicht mit Verpackung 0,12 kg
Inhalt/Menge: 100 ml
UVP: 6,59 € inkl. MwSt

Megadent

Megadent-Deflogrip Gerhard Reeg GmbH

Am Wehrhahn 39 info@megadent.de
40211 Düsseldorf Tel +49 211 17754 0
www.megadent.de Fax +49 211 17754 20

