



# COMPRESSANA CALYPSO 140

ca. 15 – 18 mmHg  
**Stützklasse III forte 140 den**

Strumpfhose und Strümpfe mit kräftiger Stützwirkung sorgen für sehr effektive Unterstützung der Venenfunktion und haben eine figurformende Wirkung. COMPRESSANA CALYPSO 140 bietet ein attraktives, glattes und gleichmäßiges Maschenbild sowie die Optik und den seidigen Glanz von hochwertigsten Feinstrümpfen.

- **feines elegantes Maschenbild – nahezu blickdicht**
- **passgenaue anatomische Form**
- **verstärkte Fußspitze und eingestrickte Ferse**
- **hohe Haltbarkeit**



Produkt	Größe	Farbe
Strumpfhose mit Komfort-Hosenteil	<b>I-VI</b> XS-XXL	sandel make-up silk sepia cafe-creme perle fumo schwarz nachtblau
„Queensize“ Strumpfhose Höschen und Oberschenkel extraweit, verstärkt	<b>III Max</b> <b>VI Max</b>	silk <b>TIPP extraweit</b> schwarz
„Stay-up“ Schenkelstrümpfe mit Spitzen-Haftband, halterlos	<b>I-V</b> XS-XL	sandel make-up silk sepia cafe-creme perle fumo schwarz nachtblau
Kniestrümpfe mit Softbündchen*	<b>I-VI</b> XS-XXL	sandel make-up silk sepia cafe-creme perle fumo schwarz nachtblau
Peep-Toe Kniestrümpfe mit offener Fußspitze	<b>I-VI</b> XS-XXL	silk <b>TIPP bei Fußproblemen</b> schwarz

Aktuelle Trendfarben erhältlich als Kniestrümpfe, Strumpfhosen und Schenkelstrümpfe in den Größen II/S – V/XL



## Größenübersicht Calypso 140

Gr.	Konfektion	Schuhgrößen	Gewicht/kg	Figurtyp	
<b>I</b>	XS	34–36	36–38	ca. 43–52	schmal – klein
<b>II</b>	S	36–38	37–39	ca. 50–60	schmal – normal
<b>III</b>	M	40–42	39–40	ca. 57–66	normal
<b>IV</b>	L	42–44	40–42	ca. 63–75	normal – groß
<b>V</b>	XL	44–46	41–43	ca. 73–90	kräftig – normal
<b>VI</b>	XXL	48–50/52	41–43	> 80	extra

## CALYPSO 140den Queensize

Gr.	Körpergröße:
<b>III Max</b>	150–175 cm
<b>VI Max</b>	170–190 cm

## Anzieh- und Pflegehinweise

Achten Sie beim Anziehen darauf, dass die Zehen nicht eingengt sind. Ziehen Sie gegebenenfalls die Fußspitze leicht nach vorne. Sorgfältige Pediküre verlängert die Lebensdauer Ihrer Strümpfe. Ringe und spitze Fingernägel können die feinen Maschen beschädigen. Gleiches gilt auch für defekte Schuhe.

Auch nach vielen Wäschen behalten **CALYPSO-Stützstrümpfe** ihr gutes Aussehen und ihre Wirkungskraft:

- **Handwäsche** mit COMPRESSANA CLEAN Feinwaschmittel in handwarmen Wasser. Gut ausspülen, nicht wringen!
- **Maschinenwäsche** mit Feinwaschmittel im Schonwaschgang bis 40°C. Wir empfehlen die Verwendung des COMPRESSANA Wäschenetzes.
- **Trocknen:** im Handtuch rollen oder auf eine Leine hängen. Nicht auf der Heizung oder in der prallen Sonne trocknen! Nicht in den Trockner!

**Vor dem Tragen waschen • auf links waschen**  
**• keine Weichspüler verwenden**

