

# DracoFixiermull

waterproof


## Wasserdichte Klebefolie zur Anwendung auf intakter Haut

DracoFixiermull waterproof ist eine transparente und wasserfeste Klebefolie zur Befestigung von primären Wundauflagen wie z. B. DracoFoam oder Kompressen. DracoFixiermull waterproof kann im ärztlichen oder häuslichen Umfeld verwendet werden.


### Indikationen:

Wasser- und bakteriendichte Verbandfixierung zur Versorgung chronischer und akuter Wunden.


Anwendung entsprechend der nachfolgenden Empfehlung und Anleitung auf der Trägerfolie oder der ärztlichen Anweisung.

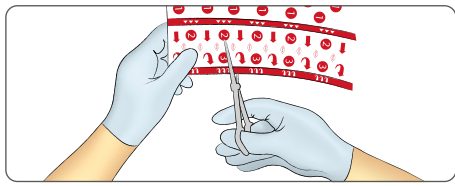


Schneiden Sie mit einer sauberen Verbandschere die benötigte Größe von der Folienrolle DracoFixiermull waterproof ab. Beachten Sie dabei, dass die gesamte Wundauflage später mit der Folie abgedeckt ist und ein großzügiger, umlaufend geschlossener Klebe-Kontakt zur Haut besteht (mind. 2 cm).

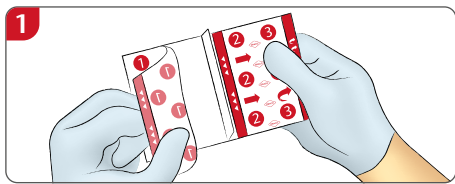


Lösen Sie von der Rückseite des Folienstücks nun den ersten Teil der Schutzfolie ① ab.

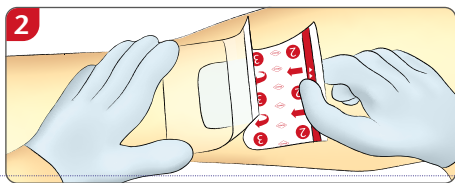

Platzieren Sie den klebenden Teil der Folie so auf Haut und Wundauflage, dass etwa die Hälfte der Wundauflage abgedeckt und auf der Haut fixiert wird.

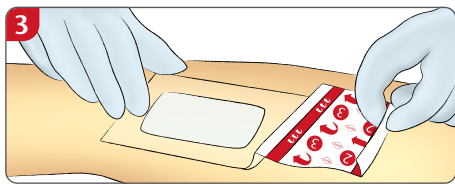

Lösen Sie nun den zweiten Teil der Schutzfolie. Dazu greifen Sie die kleine umgeknickte Lasche und ziehen die gesamte Folie ② faltenfrei in Pfeilrichtung bis zur weißen Linie ab. Drücken Sie jetzt die gesamte Folie, insbesondere auch am Rand, faltenfrei an.

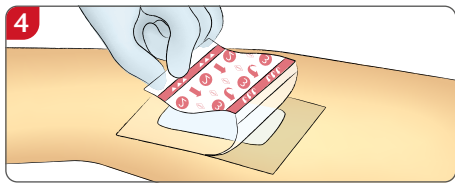

Jetzt muss noch der obere Teil der Schutzfolie entfernt werden: Dazu schlagen Sie den freihängenden Teil der Folie um und ziehen ihn in Pfeilrichtung ③ – über den weißen Balken hinweg – komplett zurück.

### Wechselintervall

- entsprechend der Primärwundauflage,
- wenn Exsudat seitlich aus der Auflage austritt,
- wenn der Verband beschädigt ist.

## Weitere Hinweise

**DracoFixiermull waterproof** hat einen starken Kleber, der nur bedingt für Patienten mit besonders sensibler und/oder fragiler (Wundumgebungs-) Haut geeignet ist. Eine Anwendung von **DracoFixiermull waterproof** kann bei den entsprechenden Personen unter Umständen Hautirritationen und Verletzungen hervorrufen. Patienten mit sensibler und/oder fragiler (Wundumgebungs-) Haut wird daher empfohlen, vor Anwendung des Produkts ihren Arzt oder Apotheker zu konsultieren.

Sollten während der Anwendung von **DracoFixiermull waterproof** Schmerzen oder Komplikationen wie allergische Reaktionen und/oder Hautreizungen (z. B. Juckreiz, Rötungen) auftreten, so ist der Verband abzunehmen und ein Arzt über die Umstände zu informieren. Zudem ist ein Arzt aufzusuchen, wenn die Wunde nicht innerhalb weniger Tage Heilungstendenzen zeigt.

Eine Wunde steht immer im Zusammenhang mit dem Gesamtorganismus. Die Beseitigung aller Faktoren, die eine Wundheilung hemmen können, ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Wundbehandlung.


**DracoFixiermull waterproof** ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Bei Wiederverwendung oder Wiederaufbereitung des Produkts kann dessen Beschaffenheit und Leistung ernsthaft beeinträchtigt werden.

Sollte dieses Produkt in Zusammenhang mit einem schwerwiegenden Vorkommnis stehen (Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person; vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen; schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit), ist dieser Vorfall dem Hersteller und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zu melden.

**DracoFixiermull waterproof** kann nach dem Gebrauch über den Hausmüll entsorgt werden.



Rev.: 211207RW-13250-GA

 Dr. Ausbüttel & Co. GmbH • Ernst-Abbe-Straße 4  
44149 Dortmund • Deutschland • [www.draco.de](http://www.draco.de)