

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Mepore® Film & Pad



Single use
Usage unique

STERILE | **EO**

CE 0086

USA 1-800-882-4582

Canada 1-800-494-5134



**MÖLNLYCKE
HEALTH CARE**




Manufacturer

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden

aktualisierung/stand Gebrauchs.info november 2011

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

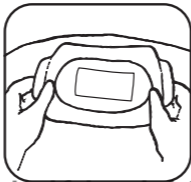

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info November 2011

Mepore® Film & Pad

Absorbierender Folienverband

Produktbeschreibung

Mepore Film & Pad besteht aus einer transparenten Polyurethanfolie, beschichtet mit einem Polyacrylatkleber und einem absorbierenden Wundkissen aus Viskose.

Eine spezielle Wundkontaktschicht verhindert, dass der Verband mit der Wunde verklebt.

Der atmungsaktive Film ist wasserundurchlässig und schützt die Wunde vor Bakterien und Keimen. Mepore Film & Pad passt sich optimal den Körperkonturen an.

Anwendungsgebiete

Mepore Film & Pad wird für die Behandlung von leicht- bis mittelstark sezernierenden Wunden, wie beispielsweise Chirurgische Wunden, Schnittwunden oder Hautabschürfungen, empfohlen.

Anwendungshinweise

1. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den Verband.
2. Säubern Sie die Anwendungsfläche und trocknen Sie vorsichtig die wundumgebende Haut.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie mit dem Mepore Aufdruck um die Klebefläche freizulegen.
4. Applizieren Sie Mepore Film & Pad auf die Haut und entfernen Sie anschließend den Applikationsrahmen aus Papier.
5. Entfernen Sie nun auch die beiden Seitenstreifen.

zur Verfügung gestellt von **Gebrauchs.info**



Verbandwechsel und Entfernung



1. Mepore Film & Pad kann abhängig vom Zustand der Wunde und Haut, sowie gemäß klinischer Praxis, mehrere Tage getragen werden.
2. Zum Entfernen, heben Sie eine Kante des Verbandes an und ziehen Sie diesen dann vorsichtig in Haarwuchsrichtung ab.

Häufigkeit des Verbandwechsels

Die Häufigkeit des Verbandwechsels sollte in Abhängigkeit des Wundzustandes und gängiger klinischer Praxis erfolgen.

Vorsicht

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
Bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen acrylhaltige Kleber sollte Mepore Film & Pad nicht angewendet werden.

Um Hautirritationen zu vermeiden, sollte der Verband nicht unter Spannung aufgebracht werden.

Die Wunde sollte gemäß klinischer Praxis auf Anzeichen einer Infektion untersucht werden. Bei Anzeichen für eine Infektion (Schmerz, Rötung, Schwellung oder ungewöhnlichem Geruch und Exsudat) sollte ein Arzt über die weitere Behandlung entscheiden.

Steril. Nicht verwenden, wenn die Sterilverpackung beschädigt bzw. geöffnet ist. Nicht resterilisieren.

Die Funktionstüchtigkeit kann bei erneuter Anwendung eingeschränkt sein und es können Kreuzkontaminationen auftreten.



Revised 2010-06

40339-04