

## **ALLEVYN AG ADH 7.5X7.5 WUN**

### **ALLEVYN Ag Adhesive 7,5x7,5 cm Wundverband**

PZN: 19407572

Inhalt: 10 St

Hersteller: Adequapharm GmbH

#### **Zweckbestimmung**

Indikationen ALLEVYN Ag Adhesive ist ein antimikrobieller, absorbierender Wundverband zur Behandlung sekundär heilender, chronischer und akuter tiefer, halbtiefer oder flacher granulierender, exsudierender Wunden, wie zum Beispiel: Druckgeschwüre, Ulcus cruris, diabetische Ulcera, Verbrennungen, Entnahmestellen, exulzierende/maligne Wunden und klaffende Operationswunden. ALLEVYN Ag Adhesive kann auf infizierten Wunden verwendet werden. Wenn das Produkt auf infizierten Wunden verwendet wird, sollten die Wunden gemäß dem lokalen Protokoll behandelt werden. Gegenanzeigen Nicht bei Patienten verwenden, bei denen Überempfindlichkeit gegen Silbersulfadiazin oder Sulfonamide bekannt ist. Da Sulfonamide als mögliche Ursache für einen Kernikterus gelten, sollte ALLEVYN Ag Adhesive nicht bei stillenden Müttern sowie Frauen am Geburtstermin oder kurz vorher, bei Frühgeborenen oder Neugeborenen in den ersten Lebensmonate angewendet werden. Für einen Gesamtüberblick über die Produkteigenschaften lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.

#### **Zusammensetzung**

ALLEVYN Ag Adhesive ist ein antimikrobieller, absorbierender dreilagiger Wundverband, der aus einem absorbierenden hydrozellulären Polyurethanschaum besteht, der Silbersulfadiazin (SSD) enthält und zwischen einer perforierten, haftenden Wundkontaktschicht und einer wasserdichten Außenfolie eingebettet ist. Der Wundverband stellt eine wirksame Schutzschicht gegen mikrobielle Kontamination dar, die die Wunde vor invasive pathogene Mikroorganismen schützt und damit schnelleres Abheilen unterstützt. SSD ist gegen im Wundverband und in der Wunde vorhandene Mikroorganismen wirksam. Bei Vorhandensein von Exsudat verhilft der Wundverband zur Erhaltung eines feuchten Wundmilieus.