

## MyStar SylkFeel® STECHHILFE

### BEDIENUNGSANLEITUNG

Die **MyStar SylkFeel** Stechhilfe ist ein medizinisches Hilfsmittel zur Gewinnung kapillarer Blutproben für die Blutzuckerbestimmung oder andere Tests, die ein oder zwei Tropfen Blut erfordern.

Die **MyStar SylkFeel** Stechhilfe wird dazu verwendet, mittels einer Lanzette Blutproben für Tests zu gewinnen. Die Stechhilfe beruht auf einem Federmechanismus, der einen automatischen Stechvorgang mithilfe eines federbetriebenen Auslöseknopfs ermöglicht.

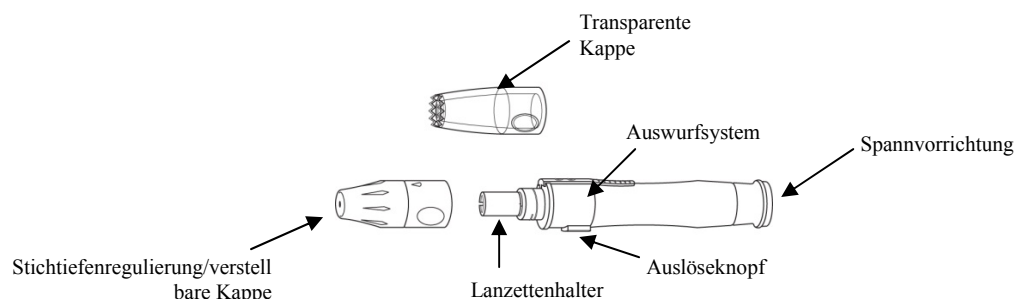
Die Stechhilfe verfügt über 5 Einstellungen für die Stichtiefe in die Haut.

Falls **MyStar SylkFeel** zusätzlich mit einer transparenten Kappe für die Blutentnahme von alternativen Körperstellen (AST) geliefert wird, überprüfen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Blutzuckermessgeräts, ob AST erlaubt ist.

### VORSICHT:

- MyStar SylkFeel darf nicht von mehreren Personen verwendet werden. Sie ist ausschließlich für den individuellen persönlichen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie immer eine neue Lanzette, die erst unmittelbar vor dem Test in die Stechhilfe eingesetzt werden darf.
- Entsorgen Sie die Lanzette nach dem Testen und lassen Sie die Lanzette nach Gebrauch nicht in der Stechhilfe.
- Reinigen Sie die Kappe nach der Anwendung.
- Entsorgen Sie die benutzten Lanzetten sicher, z. B. in einem durchstichfesten Behältnis.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Die zahlreichen Kleinteile des Geräts können zum Erstickten führen, wenn sie von Kindern verschluckt werden.

### DIE MYSTAR SYLKFEEL STECHHILFE

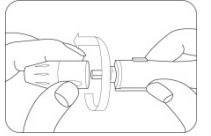
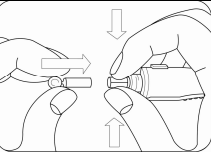
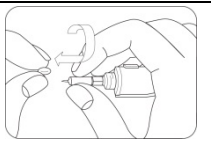
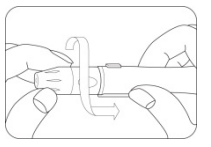
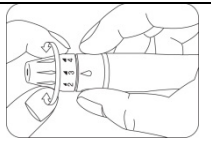
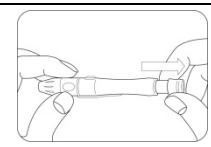
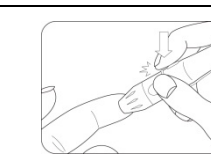


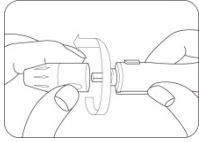
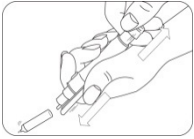
### GEBRAUCH DER MYSTAR SYLKFEEL STECHHILFE

Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Seife und warmem Wasser, um die Blutzirkulation in den Fingern zu erhöhen. Spülen Sie die Hände ab und trocknen Sie sie sorgfältig.

- Stellen Sie sicher, dass die Teststelle an Ihrer Fingerspitze frei von Fett, Öl oder Lotion ist.
- Halten Sie Ihre Hand warm oder massieren Sie die Teststelle sanft, um die Durchblutung anzuregen.

Bitte lesen Sie die folgenden Schritte und schauen Sie sich die entsprechenden Abbildungen an, um zu verstehen, wie MyStar SylkFeel anzuwenden ist. Zur korrekten Handhabung der Lanzetten lesen Sie bitte die Hinweise auf der Lanzetten-Verpackung.

	<p>1. Entfernen Sie die Kappe von der Stechhilfe, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen.</p>
	<p>2. Setzen Sie eine neue sterile Lanzette direkt in die Lanzettenhalterung ein.</p> <p><b>Hinweis:</b> Falls Sie versehentlich bei diesem Schritt das Gerät spannen, drücken Sie den Auslöseknopf, bevor Sie fortfahren.</p>
	<p>3. Halten Sie die Lanzette fest und drehen Sie die Lanzettenkappe vorsichtig ab, ohne die Lanzettenspitze zu berühren.</p>
	<p>4. Setzen Sie die Kappe wieder auf die Stechhilfe auf und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn bis zur Ausgangsposition zurück.</p>
	<p>5. Die Stechhilfe kann Ihrer Hautempfindlichkeit angepasst werden. Sie können die Stechhilfe auf 5 unterschiedliche Stichtiefen einstellen. Drehen Sie das Kappenende in die entsprechende Richtung, bis der Pfeil auf die Ziffer für die gewünschte Stichtiefe zeigt.</p> <p>1–2 für weiche oder dünne Haut,  3 für normale Haut,  4–5 für dicke oder schwielige Haut.</p>
	<p>6. Spannen Sie die Stechhilfe, indem Sie die Kappe festhalten und die Spannvorrichtung mit der anderen Hand herausziehen, bis sie einrastet.</p> <p><b>Hinweis:</b> Stechen Sie sich nicht in den Finger, bevor Ihr Blutzuckermessgerät und die Teststreifen einsatzbereit sind.</p>
	<p>7. Setzen Sie die MyStar SylkFeel Stechhilfe auf die Fingerbeere (am besten seitlich).</p> <p><b>(Hinweis:</b> Je fester Sie MyStar SylkFeel gegen den Finger drücken, desto tiefer wird der Einstich.) Drücken Sie den Auslöseknopf und entfernen Sie dann die Stechhilfe von Ihrem Finger, um eine Blutprobe zu gewinnen.</p>

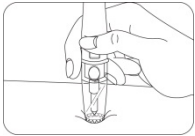
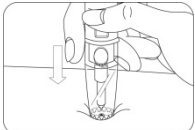
	<p>8. Entfernen Sie die Kappe von der Stechhilfe, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen.</p>
	<p>9. Alternativ: Das Aufstecken der Lanzettenkappe auf die Lanzette entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung für die jeweiligen Lanzetten. Schieben Sie den Lanzettenauswurf mit dem Daumen nach vorne und ziehen Sie gleichzeitig die Spannvorrichtung heraus, um die gebrauchte Lanzette sicher zu entsorgen, z. B. direkt in ein durchstichfestes Behältnis.</p> <p><b>Hinweis:</b> Falls die Lanzette nicht ausgeworfen wird, ziehen Sie den Lanzettenkörper vorsichtig aus dem Lanzettenhalter.</p>

## ERHÄLTICHE LANZETTEN

Die MyStar SylkFeel Stechhilfe ist geeignet für BGStar<sup>®</sup> und MyStar SylkFeel<sup>®</sup> Lanzetten.

## VERWENDUNG DER TRANSPARENTE KAPPE FÜR DIE GEWINNUNG EINER BLUTPROBE VON ALTERNATIVEN KÖRPERSTELLEN (AST)

(Bitte verwenden Sie auch Schritt 1–4 und 9 der vorangegangenen Anweisungen.)

	<p>1. Setzen Sie <b>MyStar SylkFeel</b> auf die ausgewählte Entnahmestelle der Haut, drücken und halten Sie <b>MyStar SylkFeel</b> für einen Augenblick fest, dann drücken Sie den Auslöseknopf zur Entnahme der Blutprobe.</p>
	<p>2. Kontrollieren Sie mithilfe der transparenten Kappe, ob sich ein ausreichend großer Blutstropfen gebildet hat.</p>

## LAGERUNG:

Das Produkt bei Raumtemperatur vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

## REINIGUNG:

Legen Sie die MyStar SylkFeel Stechhilfe nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Reinigen Sie MyStar SylkFeel außen mit einem feuchten Tuch mit einer milden Reinigungslösung oder Seife. Um die verstellbare Kappe oder die transparente Kappe (für AST) zu reinigen, nehmen Sie die Kappe ab und reinigen Sie sie mit warmem Wasser, spülen Sie sie gut ab und trocknen Sie sie ab.

**ServiceCenter Diabetes: Tel.: 0180/2 222 010**

(0,06 €/Anruf dt. Festnetz; Mobilfunkpreise max. 0,42 €/min)

Kontaktieren Sie im Notfall Ihren Arzt oder den medizinischen Notdienst.



**Hersteller:**  
HTL-STREFA S.A.  
Adamówek 7, 95-035 Ozorków, Poland

**Vertreiber:**  
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH  
65926 Frankfurt am Main

©2013 Sanofi  
Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken und/oder Urheberrechte sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.  
US- und internationale Patente angemeldet.

((CE-Zeichen  0344))