



**HerniaFix® Spezialbruchband mit  
einstellbarer anatomischer Pelotte**  
Art. Nr. 110 300



Bruchbänder sind bei reponierbarem Leistenbruch (d.h. der Bruch kann zurückgedrückt werden) ein seit Jahrzehnten bewährtes Therapiekonzept. Die Pelotte verschließt die Bruchpforte und verhindert somit das Heraustreten und Einklemmen des Bruches.

**Gebrauchsanleitung**

Legen Sie das Bruchband im Liegen an. Reponieren Sie den Bruch mit der Hand, anschließend die Pelotte auf der Bruchpforte positionieren. Dann das Band um den Körper auf Höhe des Beckenkamms (zwischen Taille und Hüfte) legen und verschließen. Zuletzt den Schenkelriemen zwischen den Beinen um den Oberschenkel führen und im Bereich der Hüfte an der Lederlasche befestigen.

Die Pelotte kann durch lösen der beiden Schrauben um 45° gedreht und vertikal um 4 cm verschoben werden. Dadurch wird die Anpassung in verschiedenen Positionen und die optimale Einstellung auf die Bruchpforte möglich. Anschließend die Schrauben wieder festziehen.

**Pflegeanleitung**

Bruchband mit lauwarmem Wasser mit mildem Feinwaschmittel von Hand waschen. An der Luft trocknen lassen. Hitze vermeiden.

**Indikationen**

Reponierbarer Leistenbruch

**Kontraindikationen**

Nicht reponierbarer Leistenbruch, AVK, CVI, inkarzerierte Hernie, Latexallergie.

**Wichtiger Hinweis**

Kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung eines Patienten bestimmt. Wurde das Tragen bei Nacht angeordnet, Beeinträchtigung des Blutkreislaufs vermeiden. Bei Taubheitsgefühl Bandage lockern und ggf. abnehmen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

<b>Größen</b>	<b>Umfang Beckenkamm</b>
small _____	85 - 94 cm
medium _____	95 - 105 cm
large _____	106 - 115 cm

**Materialzusammensetzung**

- 40 % Polyamid
- 36 % Polyester
- 12 % Elastodien
- 12 % Baumwolle



**BORT GmbH · Am Schweizerbach 1 · D-71384 Weinstadt-Benzach**  
Telefon (0 7151) 9 92 00-0 · Telefax (0 71 51) 9 92 00-50  
[www.bort.com](http://www.bort.com) · [medical@bort.com](mailto:medical@bort.com)

**BORT.**  
Das Plus an  
Ihrer Seite.®

D110300/D-06/18



4 003562 071447

IMB901/D-11/4