

# Protefix<sup>®</sup>

## Haft-Creme

### Classic

für Voll- und Teilprothesen

#### Protefix Haft-Creme Extra-Stark Classic

- 1. Nass-Haftkraft:** direkt auf die feuchte Prothese auftragbar
- 2. Starker Halt:** Extra-Stark mit Langzeit-Wirkung
- 3. Schutz:** eine wirkungsvolle Randabdichtung hilft, das Eindringen von Speiseresten unter die Prothese zu verhindern
- 4. Tragekomfort:** dank elastischer Polsterung zwischen Zahnfleisch und Prothese

**Bewährte Rezeptur: ohne Zinksalz, ohne Konservierungsstoffe.**  
Für Voll- und Teilprothesen geeignet.

**Anwendung:** Prothese reinigen und **Protefix** Haft-Creme Extra-Stark **Classic** in Abständen auf die nasse Prothese auftragen. Die Prothese einsetzen und einige Sekunden fest andrücken. Nach Gebrauch bitte die Tube sorgfältig verschließen; die Öffnung dabei sauber und trocken halten.

**Zusammensetzung:** **Protefix** Haft-Creme Extra-Stark **Classic** enthält: Cellulose Gum (27 %), Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer (26 %), Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Silica, Menthol, CI 14720.

**Bitte Gebrauchsanweisung beachten.**



  
**Queisser**  
PHARMA

GmbH & Co. KG  
Schleswiger Str. 74  
24941 Flensburg