

### Wundprosan® Procto



### Radikalfänger zur Behandlung von Wunden und Verletzungen im Enddarm

- Suppositorien zum Einführen in den Enddarm
- vollsynthetisches Methacrylat-Polymer POLYHEMA (Poly-2-Hydroxyethylmethacrylat) mit sterisch gehinderten Aminen (Hindered Amine Stabilizers: HAS)
- klinisch getestet [3]
- patentierte ROS-Scavenging-Technologie



| Eigenschaften  | Vorteile  |
|--|---|
| ● schmale, abgerundete Form  | ● einfaches und schmerzloses Einführen                                |
| ● makromolekulare Netzmatrix   | ● lokal begrenzte Wirkung   |
| ● enthält keine chemischen und/oder biologischen Wirkstoffe  | ● dringt nicht in den Organismus ein                                  |
| ● enthält keine biologisch abbaubaren Bestandteile (Kollagen, Hyaluronsäure, Zellulose, Stärke, u. a.) | ● hypoallergen, gut verträglich                                       |
| ● komfortabel und hygienisch   | ● keine Nebenwirkungen  |
|  | ● keine Wechselwirkung mit Medikamenten                               |
|  | ● fördert nicht das Wachstum von Mikroorganismen                      |
|  | ● Matrix deutlich weniger anfällig für eine mikrobielle Kontamination |
|  | ● kein Auslaufen auf die Unterwäsche                                  |

### Erste Suppositorien mit der ROS-Scavenging-Technologie für die Unterstützung der Behandlung bei:

- Hämorrhoidalleiden
- Analfissuren, Analfagaden
- Analfisteln
- postoperativen Wunden
- Verletzungen



äusserlich




zum Einführen

Wundprosan®  
Procto  
ist kompatibel  
mit Wundprosan®  
Wundgel

Die Wirksamkeit von Wundprosan® Procto wurde in einer klinischen Doppelblindstudie mit Patienten mit Analfissuren, Analrhagaden und Hämorrhoidalleiden nachgewiesen [3].

Analfissuren - Verringerung der Blutung

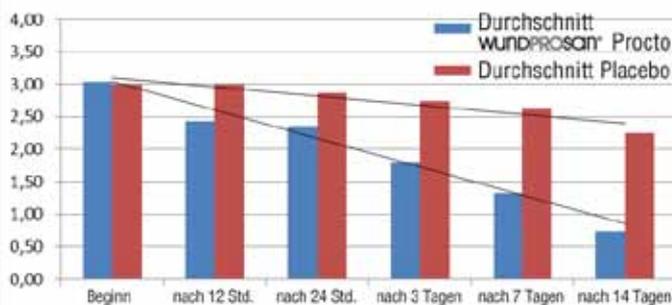


### Verringerung der Blutung

Die Diagramme zeigen die Verringerung der Blutung während der Behandlung mit Wundprosan® Procto im Vergleich zu einer Placebo-Kontrollgruppe. Nach 3 Tagen wurde eine signifikante Reduzierung der Blutung bei allen Indikationen in der Gruppe mit Wundprosan® Procto gemessen. Nach 14 Tagen waren alle Patienten mit Hämorrhoiden blutungsfrei, bei Patienten mit Analfissuren und Analrhagaden waren 71 Prozent ohne Blutung, bei 29 Prozent hat sich der Zustand deutlich gebessert. In der Placebo-Kontrollgruppe wurde nach 14 Tagen keine Besserung der Beschwerden dokumentiert.


### Wissenschaftlich belegt:

- Verringerung der Blutung
- schnelle Schmerzlinderung
- fördert und unterstützt die Wundheilung

Analrhagaden - Verringerung der Blutung

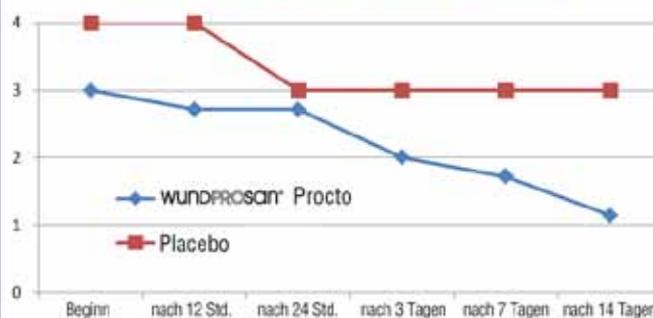

Hämorrhoiden - Verringerung der Blutung

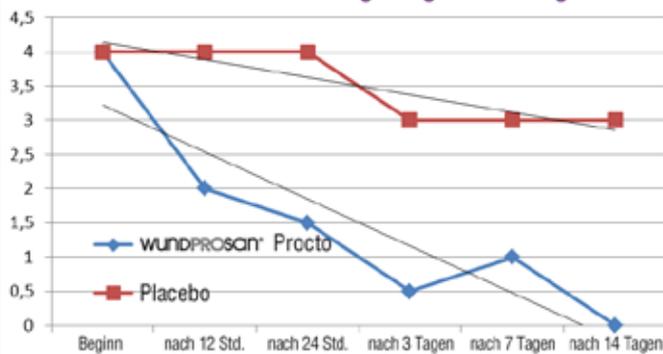

### Schmerzlinderung

Im Durchschnitt haben auch die Schmerzen nach dem 3. Anwendungstag mit Wundprosan® Procto im Vergleich zur Placebo-Gruppe deutlich nachgelassen. Nach 14 Tagen wurde die Schmerzintensität von den Patienten mit Analfissuren sogar als drei Mal niedriger bewertet als von den Patienten in der Placebo-Gruppe.

| Produkt            | Packungsgröße | Produkt-Nr. | PZN Deutschland | PZN Österreich | Pharmacode Schweiz  |
|--------------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|---------------------|
| Wundprosan® Procto | 5 Supp.       | OR15-05     | 12906510        | 4176262        | 6265001             |
| Wundprosan® Procto | 10 Supp.      | OR15-06     | 12906527        | 4272563        | 6265018             |
|                    |               |             |                 |                | <b>MiGel Nummer</b> |
|                    |               |             |                 |                | 99.12.01.00.1       |