

GENOVIA GmbH  
Kaufmannring 19  
04442 Zwenkau

Tel.: +49 34203 - 44 74 190  
Fax: +49 34203 - 44 74 181  
Mail: [info@genovia-shop.de](mailto:info@genovia-shop.de)  
Web: [www.genovia-shop.de](http://www.genovia-shop.de)

 [www.facebook.com/genoviatest](https://www.facebook.com/genoviatest)



GENOVIA  
VI - Stand: 18.09.2020

## Anleitung zur Probennahme

### ***Probenentnahme, Identitätsprüfung und Einwilligung***

Bei der Durchführung von Gentests halten wir uns an die Richtlinien der Gendiagnostik-Kommission (veröffentlicht und in Kraft getreten am 26.07.2012) sowie die Vorschriften des **Gendiagnostikgesetzes (GenDG)**. Dabei sind folgende Punkte zu beachten:

- Auf dem Auftragsformular muss die zu untersuchende Person mit **Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und ihrer ladungsfähigen Anschrift bezeichnet** werden.
- Die **schriftliche Einverständniserklärung/Einwilligung der zu untersuchenden Person muss vorliegen**. Bei Minderjährigen bzw. nichteinwilligungsfähigen Personen (nach §17 Abs. 3 GenDG) ist die **Unterschrift eines Sorgeberechtigten bzw. des gesetzlichen Vertreters** erforderlich.

### ***Durchführung des Wangenabstriches***

Von jeder Person werden **zwei** eindeutig beschriftete Mundschleimhautabstriche benötigt, da bei nicht ausreichendem Probenmaterial grundsätzlich eine zweite Untersuchung durchgeführt wird.

Die letzte Mahlzeit sollte mindestens 2 Stunden zurückliegen und die Mundhöhle vor der Probennahme mit klarem Wasser ausgespült werden. Bei Säuglingen sollte der Stillvorgang mindestens eine Stunde zurückliegen.

Öffnen Sie das Röhrchen mit dem Wattetupfer durch Drehen am weißen Verschluss. Das Wattestäbchen ist am Verschluss fixiert. Entnehmen Sie das Wattestäbchen.

**Der Wattekopf darf mit keinem anderen Gegenstand in Berührung kommen. Achten Sie vor allem bei Kindern darauf, dass das Wattestäbchen nicht verschluckt wird.**

(Für unsachgemäßen Gebrauch des Test-Kits übernimmt die GENOVIA GmbH keine Haftung.)

Reiben Sie den Wattestäbchenkopf kräftig an der Innenseite der Wange der zu testenden Person ca. **10 – 20 mal** mit gleichzeitigem Gegendruck von außen (Wattestäbchen dabei drehen). Um gut verwertbare DNA zu erhalten, ist es notwendig, den Abstrich mit etwas mehr Druck auf die Wangeninnenseite abzunehmen. Schrauben Sie das Wattestäbchen in das mitgelieferte Probengefäß und verschließen Sie dieses fest. In dieser Form kann das Material bei Raumtemperatur gelagert werden.

**Für jede Wangenseite ist ein Abstrichtupfer vorgesehen. Die Folienumverpackung werfen.**

**Bitte schützen Sie den Wattetupfer vor Berührung durch andere Personen.**

### ***Beschriftung der Probengefäße & Probenversand***

Jede Probe muss mit dem **vollständigen Namen** und dem **Geburtsdatum** der zu untersuchenden Person unverwechselbar beschriftet werden. Anschließend senden Sie die Proben in dem versiegelten Rücksendekarton direkt an unser Labor (**bitte ausreichend frankieren**), wo die Analyse durchgeführt wird.

### ***Umgang mit Ihren persönlichen Daten und Proben***

Persönliche Daten werden nur im Rahmen des Vertragsverhältnisses und der Einwilligungserklärung verwendet. Aus dem Probematerial extrahierte DNA wird, wie gesetzlich vorgeschrieben - nach Ende der Analyse - vernichtet. Die Testergebnisse werden nach den gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt (10 Jahre).