

ccuvers wipes

PZN 13836289

Artikel-Nr. innomedis: 800018



Wirksame Bestandteile

- Natriumhyaluronat
- Aloe Vera
- auf den pH-Wert des Auges abgestimmt

Indikation

- Sind speziell für die sanfte Lidrandpflege beim trockenen und juckenden Auge oder bei einer Lidrandentzündung entwickelt worden.
- Zur täglichen sanften Lidhygiene bei Blepharitis oder Blepharoconjunktivitis
- Beseitigt nicht nur überschüssiges Hautfett sondern regt die Drüsen auch zur Produktion an (führt zur Verbesserung des Tränenfilms)
- Reinigung empfindlicher Haut – auch bei Kindern
- Entfernung von Make-up


Produkteigenschaften

- Reinigungstücher mit Hyaluronsäure und Aloe Vera
- Jedes Reinigungstuch ist einzeln und hygienisch verpackt
- Medizinprodukt hergestellt unter pharmazeutischen Bedingungen
- Für Kontaktlinsenträger und Kinder geeignet.
- Enthält keine Konservierungsmittel
- Box mit 20 einzeln verpackten Einwegtüchern

Anwendung:

Zur Pflege und Reinigung der Augen und Lidränder werden die Reinigungstücher am Oberlid von oben nach unten und auf dem Unterlid von unten nach oben zum Lidspalt hin angewendet. Im Anschluss erfolgt das Ausstreichen der Rückstände von sonstigen Ablagerungen sowie Make-up jeweils von außen nach innen in Richtung Nasenrücken.


Lidmassage zum Ausdrücken von Sekreten aus den Meibomschen Drüsen

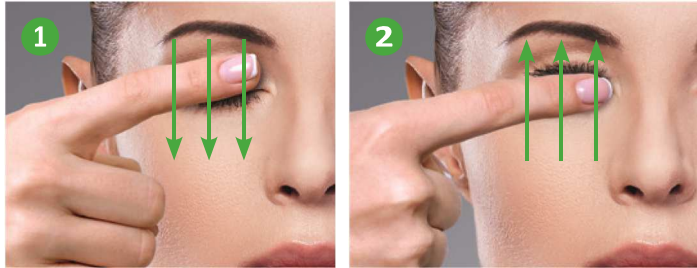

Drücken Sie mit Ihrem Zeigefinger sanft auf das Oberlid und streichen mehrfach von oben nach unten (1) und am Unterlid von unten nach oben zur Lidkante (2) und danach horizontal von außen nach innen zum Nasenrücken hin (3). Wiederholen Sie diese Bewegungen mehrfach.



Lidhygiene zur Reinigung und Entfernung von Verkrustungen und Ablagerungen

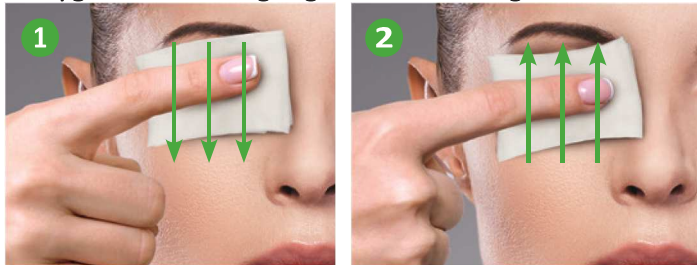

Streichen Sie mit den **ocovers wipes** am Oberlid sanft von oben nach unten (1), beim Unterlid von unten nach oben zur Lidkante (2) und danach horizontal von außen nach innen zum Nasenrücken hin (3). Wiederholen Sie die Lidreinigung so oft wie nötig bis keine Ablagerungen mehr zu erkennen sind.

