

# MalleoLoc®

Stabilorthese zur Stabilisierung des Sprunggelenks.

**Hilfsmittelnummer:**

alt 05.02.03.0011 neu 23.02.02.2004



## Indikationen

- Frühfunktionelle Therapie bei Verletzungen der Außenbandknöchel (und der Lig. bifurcati)
- Postoperative Protektion nach Bandaht/-Rekonstruktion
- Chronische Bandinsuffizienz
- Konservative Therapie von schweren Sprunggelenkdistorsionen und Bandrupturen
- Kapselbandzerrungen
- Prävention gegen Distorsionen

## Merkmale

- Optimale Versorgungsqualität in der Akutversorgung, ohne notwendige Anformung. Bei Bedarf ist eine individuelle Anpassung möglich.
- Die anatomische Form mit Außenrandfassung wirkt auch ohne Schuh anti-supinatorisch und ist darüber hinaus funktionell wirksam.
- Spezielles, ermüdungsarmes Polster sorgt für hervorragenden Tragekomfort.
- Der neuromuskuläre Einfluss der plantaren Zunge (ProprioPoint) fördert die Aktivierung der Fußheber und wirkt somit der Supination entgegen.
- Das in einer 8er-Tour zu wickelnde Velcro-Gurtsystem garantiert einfaches und schnelles Anlegen und zusätzlichen Komfort.

## Wirkweise

- Die Orthese bewirkt eine Stabilisierung gegen seitliche Umknickbewegungen des Fußes ohne nennenswerte Behinderung des normalen Abrollverhaltens.
- MalleoLoc® liegt anterolateral am Gelenk an und arbeitet dem Talusvorschub entgegen, ohne freie Beweglichkeit in der Plantarflexion einzuschränken.
- Der Immobilisierungsgrad ist durch das Gurtsystem stufenlos anpassbar ohne die Plantarflexion und Dorsalextension einzuschränken.
- Durch die plantare Zunge (ProprioPoint) werden neuromuskuläre Einflüsse gefördert und damit aktiv das Sprunggelenk durch die Muskulatur stabilisiert.



plantare Zunge ProprioPoint