

GYNELLA® Silver Foam

Vaginaler Schaum
Medizinprodukt

Das Medizinprodukt GYNELLA® Silver Foam ist ein vaginaler Schutzschaum. Der Schaum unterstützt die Gewebeheilung bei vaginalen Beschwerden. GYNELLA® Silver Foam wirkt aufgrund vielfältiger Effekte. Die Hauptwirkung beruht auf der Bildung einer Schutzbarriere im äußeren Genitalbereich, die das Gewebe vor äußeren Reizungen schützt.

Hyaluronsäure sorgt für Feuchtigkeit der Scheidenflora, die für die Wiederherstellung des physiologischen Zustands und für eine maximale Unterstützung der regenerativen und schützenden Vorgänge in der Scheide wichtig ist. Das Produkt enthält Extrakte der Malve die das Gewebe und seine Elastizität stärken, wodurch der Heilungsprozess möglicher Verletzungen gefördert wird.

Der TIAB Komplex ist die aktive Komponente des Medizinprodukts: Die patentierte Zusammensetzung aus Silberionen (Ag^+) stärkt den Schutzfilm der durch die Wirkstoffe gebildet wird. Durch die Isolierung des äußeren Genitalbereichs durch den Schutzfilm werden die besten Voraussetzungen für einen normalen Heilungsprozess geschaffen.



Anwendung

Das Medizinprodukt muss nach dem Auftreten erster Anzeichen vaginaler Beschwerden aufgetragen werden.

1. Vor Gebrauch schütteln. Reinigen Sie den zu behandelnden Bereich und trocknen Sie ihn gut ab.
2. Geben Sie eine dünne Schaumschicht auf den betroffenen Bereich.
3. Massieren Sie ihn ein, bis er trocken ist.
4. Wiederholen Sie die Anwendung einmal oder mehrmals pro Tag.

Nebenwirkungen

Unter normalen und vernünftigerweise zu erwartenden Nutzungsbedingungen sind derzeit keine mit der Anwendung des Vaginalschaums GYNELLA® Silver Foam verbundenen Nebenwirkungen bekannt. Seine Verträglichkeit wurde geprüft. Falls Sie jedoch Reizungen oder allergische Reaktionen wahrnehmen, sollten Sie die Anwendung unterbrechen und sich an Ihren Gynäkologen wenden.

Warnung

Benutzen Sie das Produkt ausschließlich für die im Beipackzettel angegebenen Anwendungen. Waschen Sie vor jeder Behandlung sorgfältig Ihre Hände. Nach dem Auftragen wird der betroffene Bereich massiert, bis er vollkommen trocken ist. Der Schaum bildet nun eine Schutzschicht. Augenkontakt vermeiden. Sollte es dennoch zu einem Augenkontakt kommen, spülen Sie die Augen sorgfältig mit Wasser aus. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Ablaufdatums. Nur zur äußeren Anwendung geeignet; nicht schlucken. Nicht verwenden, wenn die Packung geöffnet oder beschädigt ist. Nicht verwenden bei vorhandener überempfindlicher Reaktion auf einen Bestandteil des Produkts. Brechen Sie die Behandlung bei anormalen Hautreaktionen ab. Wenden Sie sich bei einer Langzeitanwendung an Ihren Arzt. Die

Zusammensetzung hat keine samenabtötenden oder empfängnisverhütenden Eigenschaften. Da keine hinreichenden Daten zur Anwendung des Produkts während der Schwangerschaft, Stillzeit sowie bei Kindern vorliegen, fragen Sie vor der Anwendung von Gynella® Silver Foam Ihren Arzt oder Apotheker.

Inhaltsstoffe

Wasser, Allantoin, Glycerin, Benzalkoniumchlorid, Natriumhyaluronat, Steareth-2, Steareth-21, Capryl- und Caprinsäure-Triglyceride, TIAB (Titandioxid-Mikrokristalle mit kovalent verknüpften einwertigen Silberionen), Milchsäure, Polyvinylpyrrolidon, glykolhaltiger Malvenextrakt, Menthylactat.

Treibgas: Butan/Isobutan/Propangemisch
50 ml

Kontraindikationen

Es liegen keine Informationen über eine Überdosierung vor. Vorhandene überempfindliche Reaktion auf einen Inhaltsstoff. Es sind keine Wechselwirkungen mit Medizinprodukten und Wirkstoffen bekannt.

Aufbewahrung

Vor Hitze und offener Flamme schützen – Rauchen verboten. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Vor Temperaturen über 50 °C schützen. Druckbehälter: Kann bei Erhitzen explodieren. Nicht anstechen oder anbrennen, auch nicht nach Entleerung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenden Sie sich bei Verschlucken oder Augenkontakt sofort an einen Arzt und halten Sie die Produktbeschreibung auf dem Etikett bereit.

PZN DE: 15201170, PZN AT: 4920200



NTC S.r.l.

Via Luigi Razza 3, 20124 Mailand, Italien

Vertrieb

HEATON k.s.

Na Pankráci 332/14, 140 00 Prag 4, Tschechische Republik

Vertrieb in Österreich durch

Pelpharma Handels GmbH

Wohndorfweg 36

A-3001 Tulbingerkogel

Österreich

Datum der Textüberarbeitung: 11/2020





Warnung

H223 Entflammbares Aerosol

H229 Druckbehälter: Kann bei Erhitzen platzen.

Von Wärme, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und sonstigen entzündbaren Stoffen entfernt halten. Rauchen verboten. Nicht anstecken oder anbrennen, auch nicht nach Entleerung. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Vor Temperaturen über 50 °C schützen. Nicht in offene Flamme oder sonstige entzündbare Stoffe sprühen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.