



Ohne Naturkautschuk hergestellt



Ohne Phthalate hergestellt



Ohne Bisphenol A und Bisphenol S hergestellt


Primo-Lacto

Ausstreichtrichter zum Auffangen von Kolostrum

Kompatibel mit nutrisafe2® Ernährungsspritzen ohne Gewinde (bis 2,5 ml)

Anwendung beim Ausstreichen:

1. Vor jeder Anwendung die Hände mit Wasser und Seife reinigen. Danach die Hände gemäß der internen Hygienerichtlinie desinfizieren.
2. nutrisafe2®-kompatible enterale Ernährungsspritze mit dem Boden des Ausstreichtrichters verbinden. Festen Sitz sicherstellen, Darauf achten, dass der Spritzenkolben komplett eingeschoben ist.
3. Mit dem Ausstreichen des Kolostrums nach Anleitung beginnen und das gewonnene Kolostrum im Ausstreichtrichter auffangen.
4. Nach dem Ausstreichen den Spritzenkolben aufziehen, um das gewonnene Kolostrum aus dem Ausstreichtrichter in die Spritze zu ziehen. **WICHTIG:** Die Spritze durch vorsichtiges Drehen vom Ausstreichtrichter entfernen.
5. Spritze verschließen und beschriften. Zum Aufbewahren und Füttern bitte den internen Richtlinien folgen.

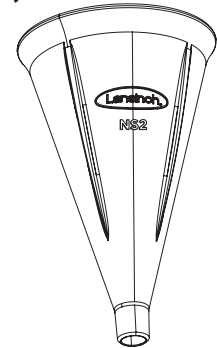

Ausstreichtrichter

⚠️ WARNUNGEN! Reinigung: Nach jeder Anwendung mit heißem Wasser und mildem Spülmittel reinigen, danach mit klarem, fließenden Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen.

	Primo-Lacto
Vor der ersten Anwendung	✓ Steril - zur sofortigen Verwendung
Nach jeder Anwendung	✓ Reinigen - Heißes Wasser und mildes Spülmittel verwenden
Täglich	✓ Desinfizieren - 5 Minuten auskochen
Desinfektion	✓ Geeignet für die Dampfdesinfektion mit Beuteln in der Mikrowelle

⚠️ WARNUNGEN! Zur Verwendung bei nur einem Patienten bestimmt. Das Produkt kann mehrfach verwendet werden. Vor jeder Anwendung das Produkt auf Beschädigungen überprüfen. Nur unbeschädigt verwenden. Bei Schmerzen während der Verwendung den Rat von medizinischem Fachpersonal einholen.

Primo-Lacto ist ein Medizinprodukt. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zu melden.

Lansinoh® is a registered trademark of Lansinoh Laboratories Inc.
nutrisafe2® is a registered trademark of Vygon SA.
© 2020 Lansinoh Laboratories Inc. All Rights Reserved. Made in China.
Vertrieb: Lansinoh Laboratories Inc., Niederlassung Deutschland, Bayerischer Platz 1, 10779 Berlin www.lansinoh.de



Lansinoh Laboratories
Saglık Gereçleri Tasarım San. Tic. Ltd. Sti.
Zafer SB Mah. Gunduz Sk. No:13 E.S.B
Gaziemir/ Izmir/ Turkiye

REF 59122

Artikelnummer

LOT

Chargennummer



Herstellungsdatum



Verwendbar bis



Nicht resterilisieren

STERILE EO

Mit Ethylenoxid sterilisiert



Vor Lichteinstrahlung schützen



Vor Nässe schützen



Gebrauchsanweisung beachten



Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist

CE 0197

CE-Kennzeichnung



Hersteller

PL591221FO520