

## GEBRAUCHSANWEISUNG

**Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

# Mastu<sup>®</sup> Salbe

Zur Anwendung bei Hämorrhoiden

### Was enthält Mastu<sup>®</sup> Salbe?

Basisches Bismutgallat, Isopropylpalmitat, dünnflüssiges Paraffin, Polyethylenwachs, Sorbitanesquioleat, Sorbitol-Lösung 70%, Titandioxid (E171), Gereinigtes Wasser, Wollwachs.

### Wie sieht Mastu<sup>®</sup> Salbe aus und wie viel Salbe ist in einer Tube enthalten?

Mastu<sup>®</sup> Salbe ist eine weiche, gelbe Salbe. In jeder Tube sind 30 g Salbe enthalten.

### Wofür wird Mastu<sup>®</sup> Salbe eingesetzt?

Mastu<sup>®</sup> Salbe ist ein Medizinprodukt zur Anwendung bei Hämorrhoiden.

Die Salbe lindert Beschwerden wie Reizungen, Juckreiz, Brennen und Nässen, die häufig im Zusammenhang mit Hämorrhoidalleiden auftreten und fördert die Wundheilung.

### Wann und wie sollten Sie Mastu<sup>®</sup> Salbe einsetzen?

Tragen Sie Mastu<sup>®</sup> Salbe bei Bedarf 2-3 mal täglich in ausreichender Menge in und/oder um den After auf.

Vor der Anwendung sollte die Haut mit warmem Wasser und einem weichen Lappen (ohne Seife) gereinigt werden.

Sie können Mastu<sup>®</sup> Salbe mit dem Finger oder mit dem beiliegenden Applikator auftragen. Drehen Sie dazu den Applikator auf die Tube und führen sie diesen in den After ein. Drücken Sie dann vorsichtig auf die Tube, bis die gewünschte Menge Salbe appliziert wurde. Reinigen Sie den Applikator anschließend, indem Sie ihn abschrauben und unter warmem Wasser ausspülen. Verschließen Sie die Tube mit der Verschlusskappe, um ein Austrocknen zu verhindern.

Die Anwendungsdauer von Mastu<sup>®</sup> Salbe sollte 30 Tage nicht überschreiten.

### Wann dürfen Sie Mastu<sup>®</sup> Salbe nicht anwenden?

Mastu<sup>®</sup> Salbe darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile des Präparates sind.

### Was müssen Sie vor oder während der Anwendung von Mastu<sup>®</sup> Salbe beachten?

Bei Blutabgang oder bei Verdacht auf Blut im Stuhl sowie bei gleichzeitigem Auftreten von Fieber und Schmerzen sollten Sie Mastu<sup>®</sup> Salbe nicht anwenden und Ihren Arzt aufsuchen.

Bitte sprechen Sie auch mit Ihrem Arzt, wenn Sie fortwährend Beschwerden mit Hämorrhoiden haben.

Das Präparat ist ausschließlich zur Anwendung im Analbereich bestimmt und darf nicht eingenommen werden.

### Was müssen Sie bei der Anwendung von Mastu<sup>®</sup> Salbe mit anderen Mitteln beachten?

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bisher nicht bekannt geworden. Bitte informieren Sie dennoch Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Medizinprodukte oder Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Sie sollten Mastu<sup>®</sup> Salbe nicht zusammen mit anderen Cremes oder Salben zur Anwendung im Analbereich oder rektal einzuführenden Medikamenten (z.B. Zäpfchen) anwenden.

Entfernen Sie eventuelle Rückstände anderer Salben oder Cremes im Analbereich vor dem Auftragen von Mastu<sup>®</sup> Salbe. Ebenso sollten Sie eventuelle Rückstände von Mastu<sup>®</sup> Salbe vor der Anwendung anderer Cremes oder Salben im Analbereich beseitigen.

#### *Hinweis:*

*Bei gleichzeitiger Anwendung von Mastu<sup>®</sup> Salbe und Kondomen kann es zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit der Kondome kommen.*

## Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Erfahrungen zur Anwendung von Mastu<sup>®</sup> Salbe während der Schwangerschaft und Stillzeit liegen nicht vor. Bitte sprechen Sie daher vor einer Anwendung von Mastu<sup>®</sup> Salbe mit Ihrem Arzt. Dieser wird den erwarteten Nutzen gegenüber den Risiken streng abwägen und über eine eventuelle Anwendung von Mastu<sup>®</sup> Salbe entscheiden.

## Was ist bei Kindern und Jugendlichen zu beachten?

Erfahrungen zur Anwendung von Mastu<sup>®</sup> Salbe bei Kindern und Jugendlichen liegen nicht vor. Bitte sprechen Sie daher vor einer Anwendung von Mastu<sup>®</sup> Salbe mit Ihrem Arzt.

## Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Es können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.

Mastu<sup>®</sup> Salbe enthält Wollwachs, das örtlich begrenzte Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) auslösen kann.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind.

## Wie ist Mastu<sup>®</sup> Salbe aufzubewahren?

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen Mastu<sup>®</sup> Salbe nach dem auf der Faltschachtel und der Tube angegebenen Verfallsdatum nicht mehr anwenden.

Mastu<sup>®</sup> Salbe darf nicht über + 25°C gelagert werden.

## Stand der Information

Dezember 2019



Hersteller Mastu<sup>®</sup> Salbe  
HÄLSA Pharma GmbH  
Maria-Goeppert-Straße 5  
23562 Lübeck, Deutschland



Hersteller Applikator  
Käsmacher GmbH & Co. KG  
Eupener Str. 1  
52222 Stolberg

## Vertrieb Deutschland & Österreich

Heilpflanzenwohl GmbH  
Alt-Moabit 101 D  
10559 Berlin  
Tel.: +49 30 209 66 97 81  
Fax: +49 30 209 66 97 89  
Internet: [www.mastu.de](http://www.mastu.de)

## Hersteller

HÄLSA Pharma GmbH  
Maria-Goeppert-Straße 5  
D-23562 Lübeck



Hersteller Mastu<sup>®</sup> Salbe



Hersteller Applikator

Medizinprodukt

9305044  
2203



STADA