

Rhinomer

babysanft

EINZELDOSIS-PIPETTEN

Natürliche isotonische Meerwasserlösung für die Reinigung von Nase und Augenlid von Säuglingen ab der Geburt

 **Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie Rhinomer babysanft anwenden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.**

Die Nasenreinigung bei Babys

Die Nase hat eine essentielle Rolle als Schutzfilter der eingeatmeten Luft. Allerdings ist es keine reine Luft, weil sie Staub, Allergene, Bakterien, Viren, Rauch usw. enthält. Diese Verunreinigungen können in der Nase Ihres Babys, und auch in der von Erwachsenen, Irritationen in Form einer Erkältung mit laufender Nase bis hin zu Allergien oder Nasennebenhöhlenentzündungen (Sinusitis) verursachen.

Die Nasenhygiene Ihres Babys ist sehr wichtig, denn dessen Abwehrkräfte sind unausgereift. Daher sind Babys anfälliger für Infektionen und Erkältungen.

Der im Nasengang natürlich vorkommende Schleim ist notwendig, da er als Luftfilter fungiert und die Nasenschleimhaut befeuchtet. Wenn das Baby jedoch an einer Infektion in der Nase leidet, ist mehr Schleim vorhanden, wodurch es noch schwieriger wird zu atmen.

Es ist wichtig zu wissen, dass Babys unter sechs Monaten nicht wissen wie man durch den Mund atmet und wenn der Schleim die Nasenlöcher verstopft, wird das Atmen erschwert: Sie weinen und das beeinflusst ihre Ernährung und ihren Schlaf. Es ist deswegen sehr wichtig, ihre Nasenlöcher durch regelmäßiges Spülen mit Meerwasser sauber zu halten.

Die Augenreinigung bei Babys

Das Augenlid kann eine Vielzahl von Mikroorganismen enthalten, einschließlich Bakterien, Pilze und Viren. Viele davon sind harmlos oder sogar nützlich und bieten Schutz vor Krankheitserregern. Andere jedoch werden mit verschiedenen Erkrankungen des Auges in Verbindung gebracht, wie z.B. mit einer Bindehautentzündung (Konjunktivitis) oder einer Lidrandentzündung (Blepharitis).

Eine Augenreinigung wird grundlegend durchgeführt, um Ausfluss aus der Augenpartie sowie Krusten an den Augenlidrändern zu entfernen. Auch leichte Augeninfektionen bei Neugeborenen werden mit Augenreinigung behandelt.

1. Was ist Rhinomer babysanft und wofür wird es angewendet?

Rhinomer babysanft ist 100 % natürliches und steriles Meerwasser geeignet zur Nasenhygiene von Babys ab dem ersten Lebenstag. Es ist auch für die Augenhygiene bei Babys geeignet.

Auch bei Erwachsenen ist es zur Augenhygiene geeignet. Für den täglichen Gebrauch.

Natürliche Salzlösung mit allen Vorteilen des Meerwassers
Rhinomer babysanft ist reich an Mineralien und Spurenelementen: Dank eines spezifischen Produktionsprozesses bewahrt Rhinomer babysanft die im Meer (Saint-Malo Küste, Frankreich) enthaltenen Mineralien und Spurenelemente.

a. Tägliche Nasenhygiene

Rhinomer babysanft reinigt und befeuchtet die Nase Ihres Babys, indem Staub, Allergene, Schadstoffe und Pathogene (Viren und Bakterien) entfernt werden.

Rhinomer babysanft ist auch als tägliche vorbeugende oder begleitende Maßnahme geeignet, wenn Ihr Baby eine verstopfte Nase hat.

b. Bei Schleim, Erkältung und verstopfter Nase

Rhinomer babysanft hilft, die Atmung durch die Nase wiederherzustellen, wenn diese verstopft ist. Es ist eine natürliche Entlastung der Nase des Babys bei Erkältung und Infektion der oberen Atemwege.

Rhinomer babysanft reinigt und weicht den Schleim für eine leichtere Entfernung auf. Es erleichtert so die Verwendung eines Nasensaugers. Die Entfernung des Schleims trägt dazu bei, das Auftreten von Hals-Nasen-Ohren-Komplikationen (wie Ohrenentzündung, Bronchiolitis) vorzubeugen.

c. Befeuchtet die Nase in trockener Umgebung z.B. aufgrund von schlechter Belüftung, übermäßiger Heizung, Flugzeugreisen

d. Augenlidhygiene

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Rhinomer babysanft beachten?



Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es defekt oder beschädigt ist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sein ursprüngliches Aussehen verloren hat.

3. Wie ist Rhinomer babysanft anzuwenden?

Da es sich bei Rhinomer babysanft um eine natürliche Lösung handelt, kann es so oft und lange wie notwendig angewendet werden. Rhinomer babysanft kann bei Babys ab dem ersten Lebenstag angewendet werden.

Empfohlene Dosierung:

Zur Anwendung in der Nase

4 mal täglich in jedes Nasenloch oder so oft wie benötigt
1 Einzeldosis-Pipette pro Nasenloch

Zur Anwendung am Auge

So oft wie benötigt

Art der Anwendung:

Zur Nasenreinigung

Für Säuglinge ab der Geburt. Es wird empfohlen, die Nase vor dem Füttern zu reinigen, wenn das Kind wach und ruhig ist. Legen Sie das Baby auf ein leicht geneigtes Bett (30°), drehen Sie den Kopf auf eine Seite (niemals nach hinten drehen, um das Risiko zu verhindern, dass Rhinomer babysanft den Rachen runterläuft).

1. Trennen Sie eine Einzeldosispipette ab und öffnen Sie die Pipette durch Abdrehen des Flügels.

- Führen Sie die Spitze vorsichtig in das obere Nasenloch ein und drücken Sie die Einzeldosis fest, um die Lösung im Nasenloch zu entleeren. Drücken Sie bei Bedarf ein zweites Mal, um die Einzeldosis vollständig zu entleeren.
- Lassen Sie die Lösung durch das andere Nasenloch herausfließen.
- Wiederholen Sie den Vorgang beim anderen Nasenloch.
Für Säuglinge ab der Geburt: Heben Sie den Rücken des Säuglings an und putzen Sie ihm die Nase.



Zur Pflege der Augenlider

- Trennen Sie eine Einzeldosispipette ab und öffnen Sie die Pipette durch Abdrehen des Flügels.
- Befeuchten Sie eine sterile Komresse mit Rhinomer babysanft.
- Wischen Sie damit über die Augenlider und achten Sie dabei darauf, keinen Staub, Schmutz oder Infektionen zu verteilen.
- Benutzen Sie für jedes Auge eine neue Komresse.



4. Zu Ihrer Sicherheit

Falls die nasalen Symptome länger als 5 Tage bei Babys und 7 Tage bei Erwachsenen und Kindern anhalten, wenden Sie sich an medizinisches Fachpersonal. Bei Verwendung durch mehr als eine Person besteht die Möglichkeit einer Übertragung von Infektionen. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfalldatums. Um dem Risiko einer Infektion oder Re-Infektion vorzubeugen, darf eine bereits geöffnete Einzeldosispipette kein weiteres Mal angewendet werden.

Nicht zur Injektion.

Für Babys: Führen Sie die Nasenreinigung nicht nach dem Füttern durch.

Im Falle von Nasenreizungen kann während der Anwendung ein vorübergehendes Kribbeln auftreten.

Bei weiteren Fragen zur Anwendung dieses Produktes fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

5. Wie sind Rhinomer babysanft Einzeldosispipetten aufzubewahren?

Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Zwischen 0 °C und 27 °C aufbewahren.

In der Originalpackung aufbewahren.

6. Weitere Informationen

Zusammensetzung: 100 % natürliches Meerwasser, unverdünnt, isotonische Konzentration (entsprechend 9 g/l NaCl). Steril, ohne Konservierungsstoffe.

Rhinomer babysanft ist in einer Packungsgröße mit 20 sterilen Einzeldosis-Pipetten à 5 ml Lösung verfügbar.

 Laboratoire de la Mer, Z.A.C. de la Madeleine, Avenue du Général Patton, 35400 Saint-Malo, France

CE 0459
Medizinprodukt

Vertrieb

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

 80258 München

 Barthstraße 4, 80339 München

Telefon (089) 78 77-209

Telefax (089) 78 77-304

E-Mail: medical.contactcenter@gsk.com

Marken sind Eigentum von oder lizenziert an GSK © 2021 GSK oder Lizenzgeber

STERILE A

Stand der Information: 2021/04



Bedeutung der Symbole

-  Vorsicht. Vor Gebrauch beiliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen.
-  Inhalt bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.
-  Temperaturbereich bei Lagerung
-  Verwendbar bis
-  Chargenbezeichnung

 Nicht zur Wiederverwendung

 Nach dem Gebrauch wegwerfen

 Recyclingsymbol für Papier

A72-0
CNOT1339-IG246661

