

Ecosym Prothesen-Reinigungsgel Daily

PZN 09508800 | Art. 2260

- Ecosym Gel – Speziell zur täglichen Reinigung von Zahn-, Total- und Teilprothesen
- Biologisches Komplett-Reinigungssystem für die tägliche Gebissreinigung



Das Ecosym Daily Reinigungsgel ist eine fortschrittliche Methode zur gründlichen Reinigung von Zahn-, Total- und Teilprothesen, ohne das Material anzugreifen. Zu den natürlichen Inhaltsstoffen des Gels gehören Zitronensäure, Eukalyptus-Öl und Meersalz. Es enthält keine Salzsäure und ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt.

Anleitung:

1. Nehmen Sie Ihre Prothese aus dem Mund und spülen Sie sie unter lauwarmem Wasser ab.
2. Geben Sie ein paar Tropfen Ecosym Daily Reinigungsgel auf Ihre Prothese.
3. Putzen Sie Ihre Prothese gründlich mit einer Prothesenbürste.
4. Danach spülen Sie die Prothese unter lauwarmem Wasser gründlich ab.

Hinweise:

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Kann eine allergische Reaktion auslösen

Merkmale, Marke, Eigenschaften und Inhaltsstoffe

Ecosym, Aqua, Sodium Chlorite, Citric Acid, Limonene, Sodium Laureth Sulfate, Eucalyptol, Benzyl Alcohol, 2-Bromo-2-Nitropropane-1, 3-Diol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, CI 181055, CI 19140

Produktinformationen

Abmessungen: 5,00 x 2,50 x 11,00 cm
Artikelgewicht: 0,075 kg
Gewicht mit Verpackung 0,08 kg
Inhalt/Menge: 60 ml
UVP: 6,69 € inkl. MwSt



Megadent

Megadent-Deflogrip Gerhard Reeg GmbH

Am Wehrhahn 39 info@megadent.de
40211 Düsseldorf Tel +49 211 17754 0
www.megadent.de Fax +49 211 17754 20