



**Gebrauchsinformation!**  
Bitte aufmerksam lesen!

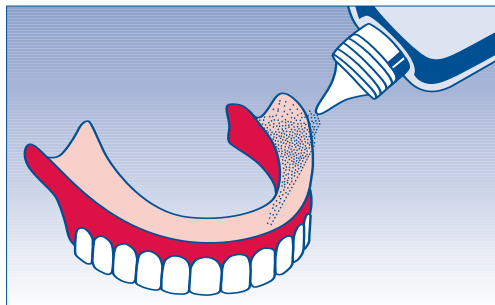

## Sicherheit für die Dritten. Protefix®

### Protefix® Haft-Pulver Extra Stark

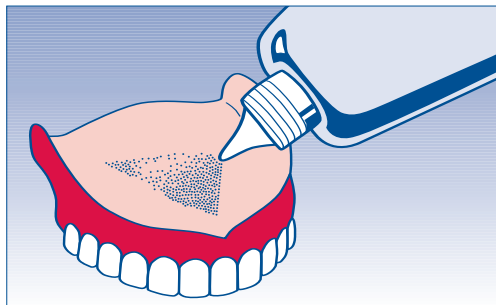

#### Anwendungsgebiet

Pulver als Haftmittel für Zahnprothesen.

#### Dosierung und Art der Anwendung

**Protefix®** Haft-Pulver gleichmäßig dünn auf die angefeuchtete Prothese streuen. Die Gebissplatte sitzt nach dem Einsetzen sofort fest und haftet viele Stunden sicher im Mund. Sollte vorzeitig Lockerung eintreten – etwa durch Genuss von viel Flüssigkeit – so genügt es, **Protefix®** Haft-Pulver dünn nachzustreuen. Die Prothese sitzt sofort wieder fest.

Etwaige Rückstände lassen sich leicht mit Hilfe einer Zahnbürste unter fließendem Wasser von der Prothese abspülen. Besonders hartnäckige Haftmittlrückstände können mit einem speiseölgetränkten Wattebausch entfernt werden. Zur Vermeidung einer zu großen Ausstoßmenge bitte die Flasche nicht zusammendrücken. Flasche schräg halten und leicht mit dem Zeigefinger antippen. Ein genaues Dosieren ist so möglich. Durch das Auftragen von zu viel Haftpulver kann sich dieses verhärtend, wodurch das Risiko einer Mundschleimhautschädigung erhöht wird.

#### Zusammensetzung:

**Protefix®** Haft-Pulver enthält: Natriumalginat

#### Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

#### Nebenwirkungen:

In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen an der Mundschleimhaut oder des Gesamtorganismus beobachtet worden. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Überempfindlichkeitsreaktion nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Zahnarzt auf.

#### Hinweise:

Die Anwendung von **Protefix®** Haft-Pulver sollte nur zeitweilig erfolgen. Eine anhaltend schlechte Haftung der Prothese ohne Haftpulver kann auf Abweichungen in ihrer Passgenauigkeit und Funktion zurückzuführen sein. In diesem Fall sollte der Arzt aufgesucht werden.

Nur auf die gesunde Mundschleimhaut auftragen. Bitte klären Sie dies mit Ihrem Zahnarzt ab.

Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

  
**Queisser**  
PHARMA

D-24914 Flensburg  
[www.queisser.de](http://www.queisser.de)

Vertrieb in der Schweiz:  
Biomed AG, CH-8600 Dübendorf

# Ihre Meinung liegt uns am Herzen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann schreiben Sie uns bitte. Gerne möchten wir uns um Ihre Wünsche kümmern. Mit der Beantwortung der folgenden Fragen helfen Sie mit, dass wir uns in Zukunft optimal auf die Bedürfnisse der Verwender von **Protifix®** Produkten einstellen können. Selbstverständlich sind alle Angaben freiwillig. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Selbstverständlich beachten wir die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns ganz herzlich.

## Wie haben Sie **Protifix®** kennengelernt?

- Apotheker       Bekannte  
 Zahnarzt       Werbung

## Warum verwenden Sie **Protifix®** Haft-Pulver?

- mich überzeugt die Produktleistung  
 andere Marken haben mich enttäuscht  
 ich probiere **Protifix®** Haft-Pulver Extra-Stark gerade aus

## Sind Sie mit der Haftkraft zufrieden?

- Ja       Nein, weil \_\_\_\_\_

## Verwenden Sie noch andere **Protifix®** Produkte?

- Ja, und zwar \_\_\_\_\_  
 Nein

Ich bin \_\_\_\_\_ Jahre alt und verwende **Protifix®** Haft-Pulver Extra-Stark seit \_\_\_\_\_.

## Ihre persönlichen Daten

Name \_\_\_\_\_  
 Straße \_\_\_\_\_  
 PLZ, Ort \_\_\_\_\_  
 Telefon \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine o.a. Daten für Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen und für Zwecke der Produktwerbung durch die Queisser GmbH & Co. KG erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Bitte einschicken an: Queisser GmbH & Co. KG, Schleswiger Straße 74, 24941 Flensburg. Weitere Informationen unter: [www.protifix.de](http://www.protifix.de) oder E-mail: [info@queisser.de](mailto:info@queisser.de).



Leiden Sie öfter unter schmerzhaften Druckstellen, Entzündungen der Mundschleimhaut oder Aphthen?

# Dafür gibt es **Protifix®** Wund- und Schutzgel.

**Protifix®** Wund- und Schutzgel ist eine aktuelle Problemlösung aus der **Protifix®** Forschung. Es hilft bei schmerzhaften Entzündungen der Mundschleimhaut, Druckstellen unter Zahnspannen oder Prothesen und bei Aphthen mit einem neuartigen Wirkprinzip:

Sein patentierter Wirkstoff „TGO“ (oxydierte Glyceroltriestere) wird durch ein besonderes Verfahren aus speziellen Pflanzenölen gewonnen und bildet bei der Anwendung einen Schutzschild, der – das ist das Neuartige! – selbst auf der Mundschleimhaut gut haftet.

- Er schützt die Wunde vor chemischen Reizen und dem mechanischen Druck der Zahnsperre oder der Prothese,
- lindert den Schmerz,
- fördert die Wundheilung.
- Kein Brennen oder Taubheitsgefühl auf der Mundschleimhaut.



**Protifix®** Wund- und Schutzgel gibt es nur in der Apotheke unter der PZN 2 651 753.