

DE

Blephagel

**Steriles Gel für die tägliche Reinigung
und Pflege der Augenlider und Wimpernansätze.
Hypoallergen*, ophthalmologisch getestet.
Frei von Konservierungsmitteln, Alkohol (Ethanol)
und Duftstoffen.**

Darreichungsform:

Steriles Reinigungsgel für Augenlider und Wimpernansätze
30 g Polydose airless™ Tube.

Ingredients:

Aqua, poloxamer 188, PEG-90, carbomer, sodium hydroxide

Anwendungsgebiet:

BLEPHAGEL ist ein hypoallergenes*, steriles Gel für die tägliche
Reinigung der Augenlider und Wimpernansätze.

Tägliche Lidhygiene wird von Augenärzten bei folgenden
Augenerkrankungen empfohlen:

- Blepharitis anterior und posterior (Lidenzündungen)
- Trockene Augen aufgrund einer Meibom-Drüsen-Dysfunktion (Funktionsstörung der Talgdrüsen in den Augenlidern)
- Beteiligung der Augen und Augenlider bei einer Acne Rosacea (Hauterkrankung mit Rötungen im Gesicht)
- Beteiligung der Augen und Augenlider bei einer seborrhoischen Dermatitis (Hauterkrankungen mit Rötung und Schuppenbildung im Gesicht)

Lidhygiene wird auch vor und nach Augenoperationen empfohlen,
die eine sorgfältige Reinigung der Augenlider und Wimpernansätze
erfordern.

BLEPHAGEL kann auch Kontaktlinsenträgern empfohlen werden.

Eigenschaften:

BLEPHAGEL ist ein speziell für die sanfte, manuelle Reinigung
empfindlicher bis überempfindlicher, gereizter oder geschädigter
Augenlider entwickeltes steriles Gel.

Die spezifische Zusammensetzung von BLEPHAGEL:

- fördert die Haftung des Gels an den Augenlidern
- emulgiert (Poloxamer 188), löst und entfernt sanft Verunreinigungen (Schleim, Verkrustungen, Schuppen) von den Augenlidern und Wimpernansätzen
- erhält die natürliche Feuchtigkeit der Augenlider
- erfrischt, beruhigt und entspannt die Augenlider
- ist nicht fettend und hinterlässt keine Rückstände

Anwendungshinweise:

- Zur äußeren Anwendung auf den Augenlidern und Wimpernansätzen bestimmt, nicht in die Augen geben.
- Nach dem Öffnen nicht länger als 8 Wochen verwenden.
- Nicht über 25°C lagern.
- Die Tube nicht aufschneiden (Keimbefall).

FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN.

Häufigkeit der Anwendung:

BLEPHAGEL wird im Allgemeinen 2 x täglich, morgens und abends,
angewandt oder immer, wenn der Zustand der Augenlider eine
Reinigung erforderlich macht.

Anwendung:

Bei der ersten Anwendung drücken Sie für 3 Sekunden leicht auf den
Kopf der Tube (auf das Théa-Logo), um das Gel in die Pumpe zu
befördern.

Drehen Sie die Tube dann auf den Kopf und drücken Sie den
Pumpkopf 3 Mal, um den Pumpmechanismus zu aktivieren.



1 Tragen Sie durch Drücken des (Pump-) Kopfes eine kleine Menge BLEPHAGEL auf eine Kompresse auf (drücken Sie nicht auf die Tube). Entfernen Sie mit der Kompresse überschüssiges Gel an der Austrittsöffnung des Pumpkopfes.



2 Schliessen Sie ein Auge und tragen Sie das Gel vor einem Spiegel vorsichtig auf Augenlid und Wimpernwurzeln des geschlossenen Auges auf.



3 Die mit BLEPHAGEL getränkte Kompresse sanft in kreisenden Bewegungen mehrmals über die Lider und Wimpernansätze führen, bis alle Verunreinigungen entfernt sind.

4 BLEPHAGEL-Reste sorgfältig mit einer sauberen Kompresse abtupfen.

5 Wiederholen Sie diese 4 Reinigungsschritte an dem anderen Auge.

Steri-Free-Technologie:

Im Bereich konservierungsmittelfreier Darreichungsformen hat Laboratoires Théa durch die Bereitstellung des ersten, unkonservierten Mehrdosissystems "ABAK" Pionierarbeit geleistet. Diese Innovation setzt Laboratoires Théa mit der Steri-Free-Technologie fort, einem neuen Verfahren, das die Herstellung eines sterilen Produkts ermöglicht, das die Sterilität des Gels ohne Verwendung von Konservierungsmitteln auch nach dem Öffnen gewährleistet.

Die Steri-Free-Technologie kombiniert 3 innovative und einzigartige Prozesse:

1. Die Zusammensetzung: frei von aggressiven Bestandteilen steht für beste Verträglichkeit. Das Gel enthält ausgewählte Inhaltsstoffe für besondere Wirksamkeit.
2. Steril vor dem Öffnen: durch das neue und innovative Herstellungsverfahren in steriler Atmosphäre, das die Produktion eines sterilen, konservierungsmittelfreien Gels ermöglicht.
3. Steril nach dem Öffnen: durch eine neue und innovative Verpackung: die Polydose Airless™ Tube gewährleistet die Sterilität des Gels während des Gebrauchs auch ohne Verwendung von Konservierungsmitteln.

Die Steri-Free-Technologie:

- gewährleistet die Sterilität und Qualität des Gels nach dem Öffnen
- schützt das Gel vor Verunreinigung und Keimbefall nach dem Öffnen
- führt zu einem Gel frei von aggressiven Bestandteilen für beste Verträglichkeit
- ermöglicht den Einsatz von Inhaltsstoffen für bessere Wirksamkeit und Sicherheit
- ermöglicht eine einfache und saubere Anwendung durch die Airless-Pumpe
- ermöglicht durch die Airless-Pumpe eine exakte und gleichmäßige Dosierung

Laboratoires Théa, Ihr Spezialist im Bereich der Augenlidhygiene, bietet Ihnen ein komplettes Sortiment an konservierungsmittelfreien Augenpflegeprodukten. Ausführliche Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage:

für Deutschland: www.theapharma.de
für Belgien und Luxemburg: www.thea.be
für Österreich: www.thea-pharma.at
für die Schweiz: www.theapharma.ch

Fragen Sie Ihren Apotheker, da nicht alle unsere Produkte in allen Ländern verfügbar sind.

**Das Produkt wurde entwickelt, um allergische Risiken zu reduzieren.*