

## Delta-Dry® Polsterwatte

Die wasserfeste Polsterwatte unter synthetischen Stützverbänden.

### Produkt

Mit Castverband duschen, baden, schwimmen oder einfach nur Hände waschen? Dafür gibt es Delta-Dry®. Bisher waren Polstermaterialien unter Castverbänden wasseruntauglich und damit war der Alltag der Patienten erheblich eingeschränkt. Delta-Dry® ist wasserfest, atmungsaktiv, waschbar und ermöglicht es den Patienten, trotz Castverband zu duschen, zu baden oder sogar schwimmen zu gehen. Auch Rehabilitationsmaßnahmen wie z.B. Hydrotherapie (Badetherapie, Bewegungsbäder) können dank der wasserfesten Unterpolsterung durchgeführt werden.

Delta-Dry® besteht aus einem innovativen, dreidimensionalen Abstandsgewirk aus wasserfesten Fasern. Durch die offene Gewebestruktur kann das komplette Wasser schnell aus dem Castverband ablaufen, während die Restfeuchte mit Hilfe der Körperwärme verdunstet. Die meisten Verbände trocknen innerhalb von ca. 180 Minuten.

Eine einseitige Haftbeschichtung erleichtert die Anlage und verhindert das Verrutschen der Binde während der Verbandanlage. Das Risiko von Hautmazerationen, Druckstellen sowie Geruch und Pruritus (Hautjucken) wird durch die Unterpolsterung mit Delta-Dry® gesenkt.

Delta-Dry® besteht aus 80% Polypropylen, 18% Nylon, 2% Polyester und einem Acrylatkleber.



Die hygienische Lösung für einen uneingeschränkten Alltag trotz Castverband.

### Anwendung

Delta-Dry® Polsterwatte eignet sich zur Unterpolsterung von allen immobilisierenden, synthetischen Stützverbänden. Am besten geeignet für

- nicht dislozierte bzw. minimal dislozierte Frakturen
- Verstauchungen
- synth. Stützverbände an Unterarm und Unterschenkel

Anwendungsdauer: bis zu mehreren Wochen



**LATEX FREE FORMULA** Latexfreie Rezeptur



### Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
7344303	2,4 m x 5,0 cm	12	1/6	00593336
7344304	2,4 m x 7,5 cm	12	1/6	00613180
7344305	2,4 m x 10,0 cm	12	1/6	00615492

## Delta-Dry® Softliner

Die hygienische Lösung, die alles mitmacht.

### Produkt

Wasserabweisende Produkte sind in der modernen Casttherapie nicht mehr wegzudenken, denn Patienten möchten wie gewohnt Hände waschen, duschen und schwimmen gehen.

Der Delta-Dry® Softliner setzt hier neue Maßstäbe für Anwender und Patient: bessere Hygiene, hoher Patientenkomfort, weniger ungeplante Castwechsel und eine extrem einfache Applikation.

Durch das innovative Material mit dem Quick-Dry-System zeichnet sich der Delta-Dry® Softliner durch seine besondere Trocknungsweise und dem daraus folgenden hohen Hygienestandard für den Anwender aus. Der Polsterverband schafft durch eine einfache und schnelle Anlage eine optimale Unterpolsterung, so dass durch den passgenauen und enganliegenden Sitz keine weiteren Polstermaterialien benötigt werden. Zudem ist eine sichere Abnahme des Verbandes für den Patienten gewährleistet, da die Fasern des Delta-Dry® Softliner bei der Benutzung von heißen Sägeblättern nicht zerstört werden.

Delta-Dry® Softliner besteht aus 100% Nylon.



Delta-Dry® Softliner – der neue Standard der modernen Casttherapie.

### Anwendung

Delta-Dry® Softliner eignet sich zur Unterpolsterung von allen immobilisierenden, synthetischen Stützverbänden. Am besten geeignet für

- nicht dislozierte bzw. minimal dislozierte Frakturen
- Verstauchungen
- synth. Stützverbände an Unterarm und Unterschenkel

Anwendungsdauer: bis zu mehreren Wochen



**LATEX FREE FORMULA** Latexfreie Rezeptur



### Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
7277901	10 m x 2,5 cm	1/4	09531348
7277902	10 m x 5,0 cm	1/4	09531354
7277903	10 m x 7,5 cm	1/3	09531360
7277904	10 m x 10,0 cm	1/2	09531383
7277905	10 m x 12,5 cm	1/2	09531408