

DE

## SANFTE UND SCHONENDE OHRENHYGIENE

### AUDISPRAY JUNIOR

AUDISPRAY JUNIOR enthält eine hypertone, mikrobiologisch kontrollierte, mit Glycerin versetzte Meerwasserlösung, die die empfindliche Haut des Gehörgangs des Kindes schützt. AUDISPRAY JUNIOR ist eine Alternative zu Wattestäbchen.

### Was ist AUDISPRAY JUNIOR?

AUDISPRAY JUNIOR weicht und löst überschüssiges Ohrenschmalz sanft auf und fördert so die natürliche Ausscheidung nach aussen, Richtung Ohrmuschel. AUDISPRAY JUNIOR enthält Glycerin mit feuchtigkeitsspendender und wohltuender Wirkung, die die Sensibilität der Kinderohren respektiert. AUDISPRAY JUNIOR enthält kein Treibgas und ist mit einem Überdruckschutz am Sprühkopf ausgestattet, der eine regelmäßige und wirksame Reinigung ermöglicht.

### Wer kann AUDISPRAY JUNIOR verwenden?

**Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren:** 1 bis 2 Sprühstöße pro Ohr, zweimal wöchentlich. **Kinder mit übermäßiger Ohrenschmalzproduktion** können AUDISPRAY JUNIOR täglich anwenden.

### Wie wird AUDISPRAY JUNIOR angewendet?

1. Setzen Sie den Sprühkopf an den Gehörgang des Kindes und sprühen Sie ein- bis zweimal. Halten Sie die Sprühflasche dabei aufrecht.
2. Massieren Sie den Ohrenansatz einige Sekunden lang.
3. Das Kind sollte den Kopf zur Seite neigen, um die überschüssige Flüssigkeit auslaufen

zu lassen, damit Sie diese abwischen können.  
4. Spülen Sie den Sprühkopf nach jeder Anwendung mit warmem Wasser.

### Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei eingesetzten Paukenröhrchen (Drainageröhrchen), Mittelohrentzündung, Trommelfeldbruch und im Allgemeinen bei Kindern mit einer medizinischen Vorgeschichte am Ohr (Schwindel, medizinische oder chirurgische Eingriffe..).

### Sicherheitshinweise zum Gebrauch

Wenden Sie sich bei Fragen oder Schmerzen vor Gebrauch des Produkts an Ihren Arzt oder Apotheker. Wenn sich bereits ein Ohrenschmalzpfropfen gebildet hat, kann AUDISPRAY JUNIOR zum Aufquellen des Pfropfens führen und dabei Schmerzen verursachen. Suchen Sie in diesem Fall bitte einen Arzt auf.


Es wird empfohlen, AUDISPRAY JUNIOR im Laufe eines Jahres, nach der erstmaligen Anwendung, aufzubrechen. Überschreiten Sie nicht das auf der Verpackung und der Flasche angegebene Haltbarkeitsdatum.

Alle schwerwiegenden, mit AUDISPRAY JUNIOR zusammenhängenden Zwischenfälle müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes gemeldet werden, in dem der Benutzer wohnhaft ist.

AUDISPRAY JUNIOR ist ein Medizinprodukt, konform mit der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG

# AUDISPRAY

## Junior 3+

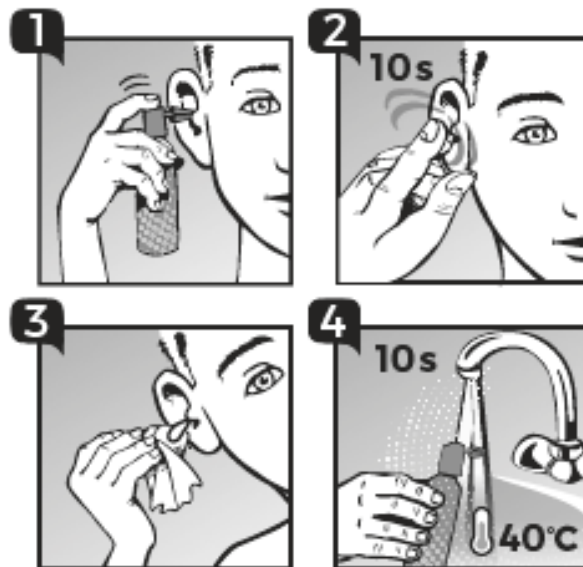

Laboratoires DIEPHARMEX S.A.  
Avenue Rosemont 8  
1208 Geneva SWITZERLAND  
Tel.: +41 (0) 22 718 64 20  
info@diepharmex.com



DI5497  
ASJ.NOT.10.2018 - Rev 3