



MEDintim
personal healthcare



Oralsafe

Latexschutz für oral-genital Kontakt

Oralsafe ist ein Latexschutztuch, das den Schutz vor übertragbaren Infektionen bei oral-genitalem Kontakt verbessert.

Anwendung:

Nehmen Sie das Latextuch vorsichtig aus der Umhüllung. Befeuchten Sie die Scheiden- oder Analregion mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis. Legen Sie **Oralsafe** über den Scheideneingang und die Klitoris, bzw. über den Analbereich. Halten Sie das Tuch während des oralen Verkehrs in seiner Lage fest. Das benutzte Tuch gehört in den Hausmüll. Bitte nicht in die Toilette werfen.

Wichtige Hinweise:

Benutzen Sie ein neues **Oralsafe**, wenn Sie zwischen den Bereichen wechseln. Zerteilen Sie die Tücher nicht und verwenden Sie jedes nur einmal! Wenn Sie oder ihre Partner/in ein Medikament im Genitalbereich verwenden, klären Sie bitte mit Ihrem Arzt die Verträglichkeit von **Oralsafe**. Bei bestehender Latexunverträglichkeit kann **Oralsafe** eine allergische Reaktion auslösen. **Oralsafe** bietet Schutz vor Infektionen.

Inhaltsstoffe:

Naturkautschuklatex

Inhalt:

8 x 1 Stk. Latextuch zur einmaligen Verwendung, lieferbar mit Vanille- bzw. Erdbeeraroma
Größe: 252 x 115 mm
Farbe: beige
Faltschachtel: 65 x 93 x 19 mm

Lagerung:

Kühl und trocken lagern.
Vor Sonnenlicht (UV) schützen

Hersteller

Kessel Marketing & Vertriebs GmbH

Verkauf über den Fachhandel und in Apotheken.

Erdbeer EAN 4013273900164
PZN 07610724

Vanille EAN 4013273900171
PZN 07610687



Medizinprodukt



Kessel Marketing & Vertriebs GmbH
Kelsterbacher Straße 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. (06105) 20 37 20
Fax (06105) 45 59 01
E-Mail: service@medintim.de



www.medintim.de