

# Gebrauchsanweisung

Doctan® Stichlinderer®

## Stichlinderer zur Behandlung von Insektenstichen und -bissen.

### Anwendungsgebiete

Reduzierung von lokalem Juckreiz und/oder Schmerzen, welche durch Insektenstiche und -bisse hervorgerufen wurden.

### Anwendung

Legen Sie den Reibeblock mit der Rille nach oben auf eine feste Unterlage (alternativ auch auf den Oberschenkel) und halten diesen stirnseitig mit 2–3 Fingern gut fest. Die andere Hand umschließt den Reibestift. Der Metalleinsatz muss hierbei nach unten zeigen. Reiben Sie den Stift bei gleichzeitigem Druck in der Rille kräftig vor und zurück. Je größer die Reibungsgeschwindigkeit und der Druck, desto schneller ist die gewünschte Temperatur erreicht. Je nach angewandtem Druck variiert die Anzahl der Bewegungen zwischen 30 und 50. In der Regel sind nicht mehr als 50 Reibebewegungen durchzuführen, da ansonsten die Temperatur zu hoch wird (Gefahr von Hautverbrennungen). Zum Prüfen der Temperatur berühren Sie mit dem Metalleinsatz kurz (ca. 1–2 Sekunden) Ihre Lippe oder Handinnenfläche. Ist die Temperatur hier noch gut erträglich, sind ca. 50°C nicht überschritten und der Metalleinsatz kann mit leichtem Druck für ca. 5 Sekunden auf die Einstichstelle gedrückt werden. So kann der Stichlinderer den Juckreiz sowie eventuell durch Insektenstiche und -bisse hervorgerufene Beschwerden lindern. Zwischen dem Stich und der

Behandlung sollten nicht mehr als 1 bis 2 Stunden vergangen sein.

### Sicherheitshinweise und Gegenanzeigen

Bei unsachgemäßer Anwendung d.h. ohne vorherige kurzzeitige Temperaturprüfung können z.B. Brandblasen entstehen. Nicht auf offenen Wunden verwenden. Das Produkt ist auch für Schwangere, Allergiker und Kinder bei Eigenanwendung ab 12 Jahren geeignet.

Machen Sie sich vor der ersten Anwendung bitte mit dem Produkt vertraut, um das richtige Gefühl für die Temperatur zu finden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Trocken lagern.

### Nebenwirkungen und Wechselwirkungen

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung sind keine Nebenwirkungen bekannt. Darüber hinaus sind keine Wechselwirkungen mit anderen Medizinprodukten oder Arzneimitteln bekannt.

### Exklusiv-Vertrieb

MEDICIS Health GmbH  
Nymphenburger Str. 4  
D-80335 München  
[www.doctan.de](http://www.doctan.de)



CE Medizinprodukte GmbH  
Waterkamp 4 • D-59075 Hamm



### Symbolerklärung



Hersteller



Artikelnummer



CE-Kennzeichnung



Gebrauchsanweisung  
beachten



Chargennummer



Vor Nässe schützen



MEDICIS  
HEALTH