

# Silflex®

## Soft silicone wound contact dressing

### Instructions for use

**Advancis**  
M e d i c a l

**Silflex®**

**Weicher Silikonwundverband**

**DEU**

#### **Produktbeschreibung**

Weiches Silflex® Silikon mit einer Wundauflage aus Polyestergerewebe. Durch das Silflex®-Design klebt das Pflaster sanft auf der Haut um die Wunde herum und nicht auf dem Wundbett. Der Verband ist atraumatisch, was bedeutet, dass er entwickelt wurde, um Schmerzen und Verletzungen beim Verbandswechsel zu minimieren. Exsudat kann durch den Verband austreten.

#### **Indikation**

Hautrisse, Hautabschürfungen, Operationswunden, Verbrennungen zweiten Grades, Risswunden, Unterschenkel- und Druckgeschwüre.

#### **Gebrauchsanleitung**

Ziehen Sie die beiden durchsichtigen Folien auf der Klebeseite ab und platzieren Sie das Pflaster direkt über der Wunde. Das Silflex® kann mit den Wundrändern überlappen. Decken Sie es anschließend mit einem zweiten Verband eigener Wahl ab. Dies kann ein absorbierender Mullverband oder ein Filmplaster sein.

#### **Gegenanzeigen**



Nicht verwenden bei Silikonallergie.

#### **Wie oft sollte man wechseln?**

Der Verband kann, je nach Zustand der Wunde, bis zu 14 Tage verbleiben.

#### **Entsorgung**

Als klinischer Abfall zu entsorgen.

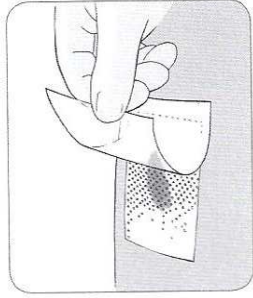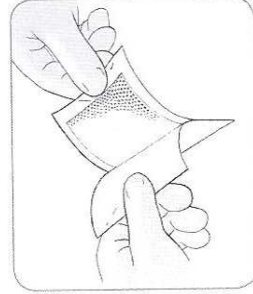

STERILE EO

