

Zahnarzt Leistung	alte KZD Vorbeleg	FZD 02	Produktname	Kategorie	Reinigungs- größe	Produktart	Produktbeschreibung
2000	1570509	11347609	GUM* EASY FLOSS 30 m, PTFE	Zahzwischenraumpflege	1 Stück	Zahnseide	Das Teflon-beschichtete (PTFE), dünne Zahnband gleitet auch bei sehr eng zusammenstehenden Zähnen gut durch den Zwischenraum, auch für Anfänger optimal geeignet. Die sanftere, besonders reißfeste Zahnseide ist sanft zum Zahnfleisch Gewacht.



Anweisung: Zahnwachse
<p>Nehmen Sie 15-20cm anemmer und wickeln Sie diese um einen Mittelfinger. Behalten Sie dabei ein kurzes Stück zwischen Ihrem Daumen und Zeigefinger. Berühren Sie Ihren Daumen und Zeigefinger und lassen Sie die Zahnseide sanft zwischen Ihre Zähne gleiten. Üben Sie keinen großen Druck aus, um das Zahnfleisch nicht zu verletzen. In jedem Zahnzwischenraum leichte Auf- und Abwärtsbewegungen durchführen. Vergessen Sie nicht bis unter den Zahnfleischrand zu reinigen und beim Wischen der Seiten einen anderen Abschnitt der Zahnseide zu verwenden.</p>