



und wuchernde Ulcera. Kann bei nekrotischen oder verschorften Wunden in Verbindung mit INTRASITE Gel verwendet werden. ALLEVYN Heel kann im Rahmen eines Druckentlastungsprogramms zusammen mit druckentlastenden Hilfsmitteln unterstützend angewendet werden. Vorsichtsmaßnahmen ALLEVYN Heel nicht gleichzeitig mit Oxidationsmitteln wie Hypochloridlösung (z.B. Eusol) oder Wasserstoffperoxid (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) verwenden, da diese die absorbierende Polyurethankomponente des Verbandes zersetzen können. Eine Rötung der Haut um die Wunde nach der Verwendung von ALLEVYN Heel wurde selten berichtet. In einigen Fällen bezieht sich dies auf eine Reizung empfindlicher Haut, in anderen Fällen kann Wundexsudat, das für längere Zeit in Kontakt mit gesunder Haut bleibt, die Ursache dafür sein. Es wurden selten Fälle einer Empfindlichkeit gegen den Verband berichtet. Bei einer Rötung oder Sensibilisierung muss der Gebrauch eingestellt werden. ALLEVYN Heel sollte zur Druckentlastung nicht ohne andere druckentlastende Hilfsmittel verwendet werden. ALLEVYN Heel ist ein Einmalprodukt. Bei einer Anwendung bei mehr als einem Patienten können Kreuzkontaminationen oder Infektionen auftreten. Nicht verwendete Produkte sollten nicht für einen späteren Gebrauch aufbewahrt werden. Für einen Gesamtüberblick über die Produkteigenschaften lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.

## **Zusammensetzung**

Nicht-haftender Wundverband aus Polyurethanschaum Beschreibung ALLEVYN Heel besteht aus einem absorbierenden hydrozellulären Polyurethanschaum, der zwischen einer perforierten nicht haftenden Wundkontaktschicht und einer wasserdichten, atmungsaktive Außenfolie eingebettet ist.