

15862925

Leukomed® T skin sensitive, steril, wasserdichter Filmverband, Inhalt 5 Stk., 5 x 7.2 cm

Leukomed® T skin sensitive von Leukoplast® – transparenter Folienverband und Fixierung

Leukomed T skin sensitive ist eine transparente, sterile Folie zur Fixierung von Verbänden und zur Versorgung akuter Wunden und damit auch für die postoperative Versorgung geeignet. Für Menschen mit sehr empfindlicher Haut ist die Leukoplast Skin Sensitive Technologie besonders geeignet, da der Silikonantrag besonders schonend ist.

Produkteigenschaften von Leukomed T skin sensitive auf einen Blick

- Sanft zu empfindlicher oder geschädigter Haut, z. B. bei älteren Menschen, die durch Krankheiten geschwächte Haut aufweisen und/oder für Säuglingen
- Wasserdicht, kann unter der Dusche getragen werden
- Steril und gut geeignet zum Abdecken von Wunden nach Operationen
- Schmerzarme und atraumatische Entfernung
- Atmungsaktiv, verhindert Mazeration
- Bleibt bis zu 7 Tage an Ort und Stelle
- Größe: 5 x 7,2 cm, Menge 5

Applikation

Leukomed T skin sensitive dient zur Fixierung von Verbänden und zur Versorgung von akuten Wunden, wie geschlossenen Operationswunden, Schnitt- und Schürfwunden.

1. Entfernen Sie die selbstklebende Schutzfolie (1)
2. Legen Sie den Verband über die Wunde und ziehen Sie die zweite klebende Schutzfolie ab (1)
3. Den Verband glatt streichen und leicht andrücken
4. Halten Sie die rote Lasche (2) und ziehen Sie die obere Trägerfolie ab