	VORGESCHLAGENER ANLEITUNGSTEXT	Juni 2022
	AQUA MARIS® Classic Nasenspray, 30 ml	S.: 1/2

AQUA MARIS® Classic

100 % natürliches Nasenspray

Eine wohltuende und natürliche Behandlung mit Meerwasser aus der Adria, reich an Salzen und Spurenelementen, zum **Befeuchten und Reinigen trockener und gereizter Nasen**. Sanft und effektiv. Für die tägliche Anwendung geeignet.

Zusammensetzung

Die Lösung enthält Meerwasser aus der Adria, das reich an Salzen und Spurenelementen ist. Die in der Lösung enthaltenen Spurenelemente spielen eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung einer gesunden Funktion der Nasenschleimhaut, wodurch wiederum die Durchgängigkeit der oberen Atemwege unterstützt wird.

Frei von Konservierungsstoffen.

Verpackung

30 ml isotonische Lösung, ohne Konservierungsstoffe (200 Sprühstöße), in einer Glasflasche mit Dosierpumpe.

Verwendungszweck

Für die gesunde Funktion der Nasenschleimhaut und eine normale Atmung braucht es eine feuchte Schleimhaut. Aqua Maris® Classic **befeuchtet und reinigt die Nase** und regeneriert gleichzeitig die Nasenschleimhaut.

Wann und wie wendet man das Aqua Maris® Classic Nasenspray an?

- Zur Aufrechterhaltung von Nasenhygiene und Komfort sprühen Sie 1- bis 2-mal in jedes Nasenloch. Diesen Vorgang können Sie mehrmals täglich wiederholen – auch über einen längeren Zeitraum.
- Zur Behandlung einer durch Klimaänderungen trockenen und gereizten Nase – z. B. bei extrem trockener Luft aufgrund von Klimaanlage, Luftverschmutzung oder plötzlichen Änderungen der Temperatur und Luftqualität (z. B. auf Reisen) – sprühen Sie 3- bis 4-mal so oft wie nötig in jedes Nasenloch.


Entfernen Sie vor der ersten Verwendung die Kappe und drücken Sie die Pumpe 2- bis 3-mal, damit die Luft entweicht.

Aus hygienischen Gründen sollte das Produkt nur von einer Person verwendet werden; teilen Sie es nicht mit anderen.

Wer kann dieses Produkt nutzen?

Die sanfte Wirkung von Aqua Maris® Classic unterstützt die Beschaffenheit der Schleimhaut und hat keine systemische Wirkung. Es ist daher selbst für Kinder, Schwangere und stillende Mütter geeignet.

Warum probieren Sie nicht auch unsere anderen Aqua Maris® Produkte aus?
Aqua Maris®. Schärfen Sie die Sinne.

	VORGESCHLAGENER ANLEITUNGSTEXT	Juni 2022
	AQUA MARIS® Classic Nasenspray, 30 ml	S.: 2/2

PRODUKTNAME	VERWENDUNGSZWECK	INHALTSSTOFFE
Aqua Maris® Baby Nasentropfen	befeuchtet und reinigt die Nase; geeignet für Babys ab dem ersten Lebenstag	isotonisches Meerwasser
Aqua Maris® Baby Nasenspray	befreit die Nase und entfernt Verunreinigungen, Bakterien und Viren aus der Babynase	isotonisches Meerwasser
Aqua Maris® Clean Nasenspray	befreit die Nase von Verunreinigungen, Bakterien und Viren	isotonisches Meerwasser
Aqua Maris® Refresh Nasenspray	erfrischt, schützt und reinigt	Meerwasser + Lavendel- und Immortelle-Hydrolate
Aqua Maris® Plus Nasenspray	regeneriert die Nasenschleimhaut	Meerwasser + D-Panthenol
Aqua Maris® 4Allergy Nasenspray	lindert Allergiesymptome	Ectoin® 2 % + Meersalz
Aqua Maris® Strong Nasenspray	befreit natürlich die Nase	hypertones Meerwasser
Aqua Maris® Thalassotherapie Nasen- und Nebenhöhlenspülung	reinigt die Nasenhöhle und die Nebenhöhlen mit einer Lösung mit wohltuendem natürlichem Meersalz und Heilkräutern aus dem Mittelmeer	Neti Pot + 30 Beutel natürliches Meersalz ohne Zusatzstoffe, angereichert mit ätherischen Myrten- und Immortellenölen
Aqua Maris® Thalassotherapie Meersalz mit ätherischen Myrten- und Immortellenölen	Meersalz aus der Adria zur Verwendung mit Aqua Maris® Thalassotherapie , einer Nasen- und Nebenhöhlenspülung	30 Beutel natürliches Meersalz ohne Zusatzstoffe, angereichert mit ätherischen Myrten- und Immortellenölen
Aqua Maris® Throat Hals- und Mundspray	lindert Reizungen des Rachens und der Mundhöhle	hypertones Meerwasser
Aqua Maris® Propolis Hals- und Mundspray	hilft bei gereiztem und entzündetem Rachen und reduziert Reizungen der Mundhöhle.	Meerwasser + Propolis- Extrakt

Hinweis

Keine besonderen Lagerungsbedingungen. Außerhalb der Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren. Verwenden Sie das Produkt nicht nach dem Verfallsdatum.

Hersteller

JGL d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Kroatien



Datum der Überarbeitung der Gebrauchsanweisung

Juni 2022


Erklärung der Symbole auf dem Produkt



Siehe Gebrauchsanweisung



Sterile, keimfreie Verarbeitung

	VORGESCHLAGENER ANLEITUNGSTEXT	Juni 2022
	AQUA MARIS® Classic Nasenspray, 30 ml	S.: 3/2



Hersteller



Chargennummer



Verfallsdatum



CE-Zeichen



Die Aqua Maris Produkte sind zertifiziert als frei von Mikroplastik.