

URGOSTART BORDER 8X8CM

URGOSTART Border 8x8 cm Schaumstoffwundverband

PZN: 19487140

Inhalt: 10 St

Hersteller: EurimPharm Arzneimittel GmbH

Zweckbestimmung

UrgoStart Border wird angewendet zur Abdeckung und Behandlung folgender Hautwunden: - Unterschenkelulzera. - Diabetische Fußulzera. - Druckulzera (Dekubitus). - Andere Wunden mit langwieriger Wundheilung oder wiederkehrende Wunden / Wunden mit dem Risiko einer verzögerten Wundheilung. UrgoStart Border ist für die Anwendung bei Wunden bestimmt, die überwiegend mit Granulationsgewebe (rötliches Gewebe im Wundbett) bedeckt sind.

Zusammensetzung

UrgoStart Border besteht aus: - Einer absorbierenden Komresse aus Polyurethanschaum, die mit der TLC-NOSF-Technologie (Lipidokolloid-Technologie - Nano-Oligo-Saccharid-Faktor) beschichtet ist. Die TLC-NOSF-Technologie besteht aus flüssigem Paraffin, Natrium-Carboxymethylcellulose (CMC), Kalium-Sucrose-Octasulfat (Nano-Oligosaccharidfaktor) und Polymeren. - Einer superabsorbierenden Innenschicht aus Cellulose und Polymeren. - Einem dampfdurchlässigen und wasserdichten Träger mit einem Silikon-Haftrand, der die Wundaufgabe an ihrem Rand kleben lässt.