

Blepha soft

30 sterile Lidreinigungstücher
zum einmaligen Gebrauch

1. ANWENDUNGSGEBIETE

Blepha soft Lidreinigungstücher sind geeignet zur täglichen lokalen Anwendung an Augenlidern und Wimpern aller Altersgruppen zur Entfernung von Sekreten und Ablagerungen infolge von Allergien, Entzündungen und/oder Infektionen, wie z. B. Blepharitis und Blepharokonjunktivitis verschiedener Ursachen. Blepha soft wird auch für die tägliche Anwendung bei Personen empfohlen, die zu Blepharitis oder Konjunktivitis neigen. Eine regelmässige Behandlung des Lidrandes (durch Auflegen einer warmen Kompresse und sanfter Massage) kann zu einer Verbesserung der Meibomdrüsenfunktion, insbesondere bei Verschluss der Drüsen-Ausführungsgänge führen. Blepha soft ist besonders geeignet für die prä- und postoperative Verwendung in der Augen Chirurgie. Aufgrund seiner besonderen Zusammensetzung ist Blepha soft auch für Kontaktlinsenträger geeignet.

2. EIGENSCHAFTEN

Alle Inhaltsstoffe von Blepha soft sind optimal auf die Bedürfnisse der empfindlichen Augenregion abgestimmt. Mit dem Tuch können Sekrete, Fremdkörper, Staub usw. sanft entfernt werden. Es ist parfümfrei, pH-neutral, frei von Fetten und Ölen und das Tuch hinterlässt keine Fusseln. Blepha soft ist für die tägliche Anwendung im Augenbereich geeignet.

3. ZUSAMMENSETZUNG

Tuch aus 100 % Baumwolle getränkt mit einer Lösung aus: Aqua, Polysorbate 20, Xylitol, Glycerin, Sodium Hyaluronate, Aloe barbadensis leaf juice powder, Disodium phosphate, Sodium phosphate, Phenethyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA

4. GEBRAUCHSANWEISUNG

Waschen Sie Ihre Hände gründlich, öffnen Sie den Beutel und entnehmen Sie das sterile Lidreinigungstuch. Wischen Sie die Augenlider vorsichtig mit dem Tuch ab, um eine sorgfältige Reinigung und Entfernung der Augensekrete und anderen Ablagerungen (Smog, Schwebeteilchen, Staub usw.) zu erzielen. Bei besonders hartnäckig und schwer zu entfernenden Rückständen oder verschlossenem Tränenkanal oder der Meibomschen Drüsenausgängen wird empfohlen, den geschlossenen Beutel einige Minuten in lauwarmem Wasser (etwa 40 °C) zu erwärmen. Das Tuch anschließend wie eine Kompresse auflegen und die Augenregion damit sanft massieren. Dabei ist zu beachten am Oberlid sanft von oben nach unten, beim Unterlid von unten nach oben zu streichen, d. h. jeweils zum Lidspalt hin. Sollten die Augenlider entzündet und geschwollen sein, ist es ratsam, Blepha soft gekühlt zu verwenden. Kühlen Sie dazu den geschlossenen Beutel für mindestens 1 Stunde im Kühlschrank und legen Sie das Tuch anschließend für einige Minuten als kalte Kompresse auf das geschlossene Auge, bevor Sie die Augenregion damit sanft massieren.

5. WARNHINWEISE

Die Sterilität des Produktes ist nur gewährleistet, wenn die Verpackung unbeschädigt ist. Kühl und trocken aufbewahren und vor Staub schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Für den äußerlichen Gebrauch. Die Behandlung ist bei Auftreten von sichtbaren Irritationen oder Überempfindlichkeitsreaktionen abubrechen. Im Falle einer Entzündung, das Tuch nicht für beide Augen verwenden. Zum einmaligen Gebrauch. Aufgrund der natürlichen, pflanzlichen Extrakte können die Tücher eine leicht gelbliche Verfärbung aufweisen. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.



PROMEIA S.p.A.

Corso della Vittoria 1585/1533

I-21042 Caronno Pertusella (VA)

Vertrieb:

PHARMA STULLN GMBH

Werksstrasse 3

D-92551 Stulln, Germany

€ 0425



STERILE R

Rev.1 of 30/04/2019