


FitoroiD^{neo}

SCHÜTZENDE UND LINDERNDE
REINIGUNGS CREME

**Beschwerden
bei Hämorrhoiden**

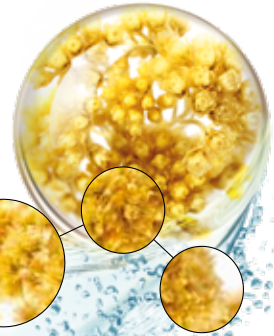

mit **HELVDOL** und
ätherischen Ölen aus
Teebaum und **Thymian**

MEDIZINPRODUKT

Die **schützende und lindernde Reinigungscreme Neofitoroid** ist ein Medizinprodukt auf Basis pflanzlicher Molekülkomplexe spezifisch für den analen und perianalen Bereich, das **ausgewogen reinigend und gleichzeitig schützend und lindernd** wirkt, nützlich zur Linderung der im Fall von Hämorrhoiden auftretenden Beschwerden.

Die **schützende und lindernde Reinigungscreme Neofitoroid** ist geeignet im Fall von **Hämorrhoiden**, als Hilfsmittel zur spezifischen therapeutischen Behandlung und nützlich in allen Fällen von **Entzündung, Reizung, Rötung und Trockenheit**.

WIRKUNGSWEISE

Reinigt auf ausgewogene Weise dank der Lipidkomponente der Formulierung und der Auswahl von Tensiden natürlicher Herkunft mit hoher Hautverträglichkeit, die nicht nur für eine geringe Schaumentwicklung des Produkts für eine milde und daher nicht reizende Wirkung sorgen, sondern auch die schützende und lindernde Wirkung der funktionellen Bestandteile fördern.

Die schützende und lindernde Reinigungscreme Neofitoroid wirkt dank Helydol, einem gefriergetrockneten Extrakt aus der gereinigten lipophilen Fraktion einer spezifischen Auswahl der Strohblume, angereichert mit **Aloe, Mäusedorn, pflanzlichen und ätherischen Ölen**. Das Produkt **beruhigt die Reizung, befeuchtet die Schleimhaut und unterstützt deren Normalisierung durch 3 Wirkungsmechanismen**:

- 1. Mucoadhäsiv:** Haftet an der Schleimhaut, indem es einen Film mit Barriereeffekt bildet, der diese vor dem Kontakt mit Reizstoffen schützt.
- 2. Antioxidativ:** Schützt die Schleimhaut vor freien Radikalen.
- 3. Erfrischend:** Sorgt für eine schnelle Linderung der Beschwerden.

Darüber hinaus **schafft Neofitoroid eine ungünstige Umgebung für das Wachstum von Mikroorganismen**, wodurch eine weitere **Schutzwirkung** und **Reduzierung des Juckreizes** bedingt wird.

ANWENDUNGSGEBIETE

Reinigung des analen und perianalen Bereichs im Fall von **Hämorrhoiden**, als Hilfsmittel zur spezifischen therapeutischen Behandlung und in allen Fällen von **Entzündung, Reizung, Rötung und Trockenheit**.

Lindert die Beschwerden und sorgt für ein schnelles Frischegefühl.

Kann auch täglich angewandt werden, insbesondere bei Personen, die unter wiederkehrenden Hämorrhoidalbeschwerden leiden und in allen Fällen von erhöhter Empfindlichkeit und einer Veranlagung für Reizungen (Verstopfung, Durchfall, ungesunde Ernährung und Lebensweise).

Kann auch in der Schwangerschaft und Stillzeit angewandt werden.

ANWENDUNGSHINWEISE

Das Produkt auf die zu reinigenden Bereiche auftragen und es vor dem Abspülen einige Sekunden einwirken lassen. **Sanft abspülen und ohne Reiben abtrocknen.**

Die Anwendung nach jedem Stuhlgang wiederholen. Die Anwendung kann mehrmals am Tag wiederholt werden, auch über einen längeren Zeitraum.

ZUSAMMENSETZUNG

Funktionelle Bestandteile: Gefriergetrocknete Extrakte aus der lipophilen Fraktion von Strohblumenspitzen (Helydol)* und Mäusedornwurzel*; dehydriertes Gel aus Blättern der Aloe vera*; wässrige Lösung aus Strohblumenspitzen*; öliger Extrakt aus Johanniskrautblütenspitzen*; Jojobaöl*; Sheabutter*; Sonnenblumenöl*; ätherische Öle aus Teebaum und rotem Thymian.

Reinigungsbasis: Besteht aus Tensiden pflanzlicher Herkunft, wie Kokosglucosid und Polyglycerylcaprylat/caprat, und Tensiden pflanzlicher und mineralischer Herkunft, wie Natrium- und Dinatriumcocoylglutamat.

Enthält außerdem: Deionisiertes Wasser, Milchsäure, Glycerin, Caprylsäure-/Caprinsäuretriglycerid, Glycerinstearat/-citrat, Cetearylalkohol, Natriumstearoylglutamat, Glycerinstearat, Xanthangummi, Tocopherol, Carrageen, Glucose, Natriumbenzoat, Kaliumsorbat, Benzylalkohol.

**Inhaltsstoff aus biologischem Anbau*

Frei von SLS und SLES, Erdölderivaten, Parabenen, PEG, synthetischen Farb- und Duftstoffen

HINWEISE

Bei Überempfindlichkeit oder Allergie gegen einen oder mehrere Inhaltsstoffe nicht anwenden.

Bei Zimmertemperatur aufbewahren und vor Hitze und Licht schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verfallsdatum bezieht sich auf das ungeöffnete und ordnungsgemäß aufbewahrte Produkt.

VERFALLSDATUM

Siehe Verfallsdatum auf der Verpackung. Nach Ablauf des angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Es wird empfohlen, das Produkt nach dem Öffnen innerhalb von 6 Monaten zu verwenden.

VERKAUFSPACKUNG: 100 ml Airless-Flasche

Letzte Überarbeitung: Oktober 2016

ZUR BEHANDLUNG DER HÄMORRHOIDEN



NEOFITOROID BIO-SALBE ZUR ENDOREKTALEN ANWENDUNG

Lindert Schmerzen, Brennen und Juckreiz

MEDIZINPRODUKT Klasse IIb

NeoFitoroid Bio-Salbe eignet sich zur Behandlung der (internen und externen) Hämorrhoiden und der damit verbundenen Symptome, wie Schmerzen, Brennen und Juckreiz im analen und perianalen Bereich. Kann auch bei Analfissuren angewendet werden.

NeoFitoroid Bio-Salbe kann auch prophylaktisch sowie in allen Situationen eingesetzt werden, die Reizungen und/oder eine Blutstauung des analen und perianalen Bereichs verursachen können (Verstopfung, Durchfall, ungesunde Ernährung und Lebensweise).

NeoFitoroid Bio-Salbe kann auch in der Schwangerschaft und Stillzeit angewandt werden.

40 ml Tube - Enthält endorektalen Applikator



Aboca S.p.A. Società Agricola - Località Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com

Unternehmen mit nach ISO 9001 und ISO 13485 zertifiziertem Qualitätsmanagementsystem
und nach ISO 14001 zertifiziertem Umweltmanagementsystem.