

# MICRODROP HYGIENEBOX

## MICRODROP HygieneBox

PZN: 16686318

Inhalt: 1 St

Hersteller: MPV Medical GmbH

### Zweckbestimmung

MicroDrop® HygieneBox Desinfektionsbox mit BioCote® - einer antibakteriellen Beschichtung, die das Keimwachstum hemmt. Häufig ist die korrekte Desinfektion sehr zeitaufwändig oder schwierig. Doch mit der MicroDrop® Hygienebox können Medizinprodukte und Babyartikel ab sofort hygienisch sicher und einfach desinfiziert werden! Schritt 1 Legen Sie die gereinigten Produkte in die MicroDrop® HygieneBox und füllen Sie 100 ml Trinkwasser ein. Schritt 2 Stellen Sie die gefüllte Box in die Mikrowelle und stellen Sie Leistung und Zeit entsprechend ein. Schritt 3 Der heiße Dampf, der in der MicroDrop® Hygiene-Box entsteht, tötet effektiv Bakterien und Keime ab. Nach Ablauf der Zeit haben Sie sicher desinfizierte Medizinprodukte. Verwendbar als Mikrowellendesinfektor (Dampfsterilisation) oder zur Verwendung mit Desinfektionsmittel. Die MicroDrop® HygieneBox kann durch die BioCote® Beschichtung anschließend als Aufbewahrungsbox verwendet werden. Die spezielle BioCote® Beschichtung sorgt dafür, dass das Keimwachstum in der Box gehemmt wird. Im Vergleich zu "normalen" Plastikboxen bietet sie somit einen extra Schutz vor Neuinfektionen! Passend für Inhalationszubehör, wie Vernebler, Mundstücke und Masken. Aber auch für andere Medizinprodukte und Babyartikel (Schnuller, Beißringe, etc.). Die MicroDrop® HygieneBox ist vielfach wiederverwendbar und reduziert so im Vergleich zu Mikrowellenbeuteln, o.ä. das Plastikmüllaufkommen. Lieferumfang: MicroDrop® Hygienebox mit Gebrauchsanleitung